




Contour[®] plus ONE[»]

Контур[®]Плюс УАН
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Как загрузить и установить мобильное Приложение **CONTOUR™ DIABETES** (Контур Диабитис)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

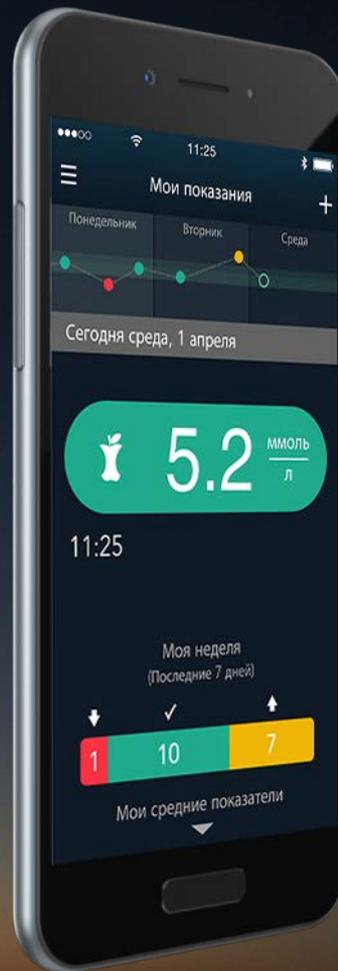

**Contour[®]
plus ONE[»]**

Система для измерения
уровня глюкозы в крови

РУ №ФСЗ 2008/02237 от 30 мая 2017 года

©2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.

www.contourplusone.ru

1.

Загрузка Приложения

На ваш iPhone или iPad:
зайдите на App Store.




Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Загрузка Приложения

На ваш iPhone или iPad:
зайдите на App Store.

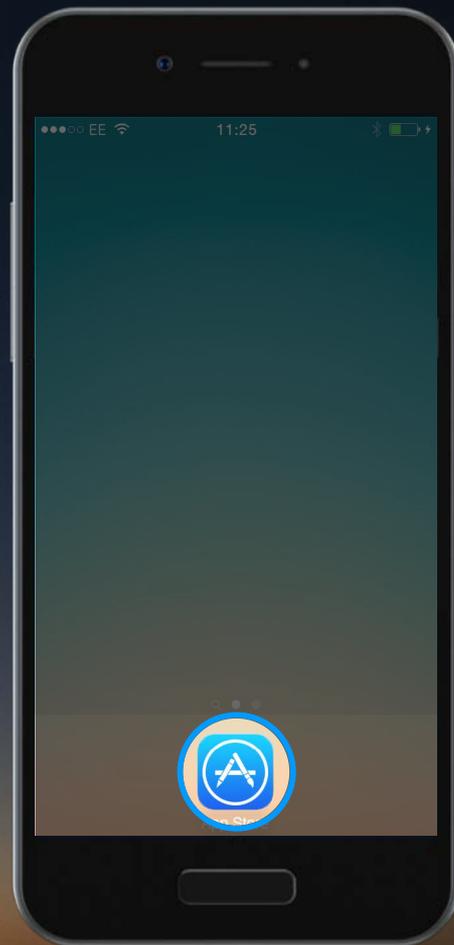

Contour[®]
plus ONE[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

2.

Загрузка Приложения

Найдите Приложение **CONTOUR**



Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

2.

Загрузка Приложения

Найдите Приложение **CONTOUR**




Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

2.

Загрузка Приложения

Найдите Приложение **CONTOUR**

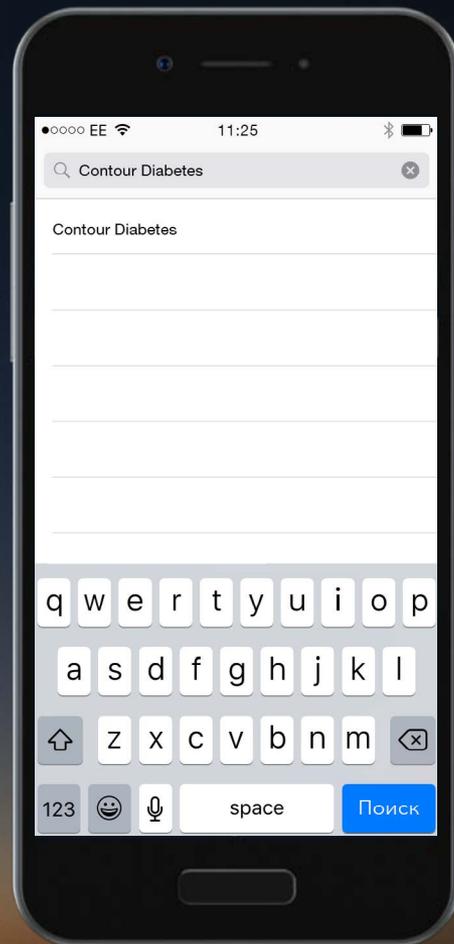

Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

2.

Загрузка Приложения

Найдите Приложение **CONTOUR**




Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Загрузка Приложения

Выберите “Установить”, чтобы начать “установку” Приложения **CONTOUR DIABETES**.

При запросе введите ваш пароль.

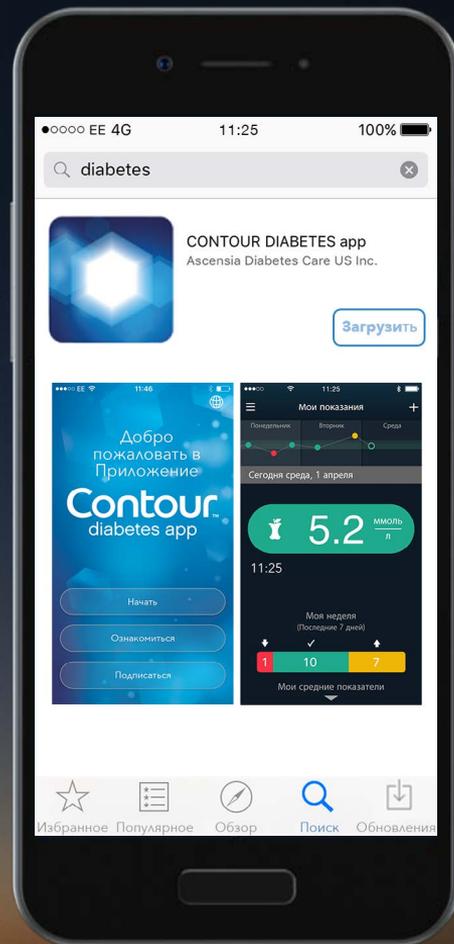


Contour[®]
plus **ONE**[™]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Загрузка Приложения

Выберите “Установить”, чтобы начать “установку” Приложения **CONTOUR DIABETES**.

При запросе введите ваш пароль.

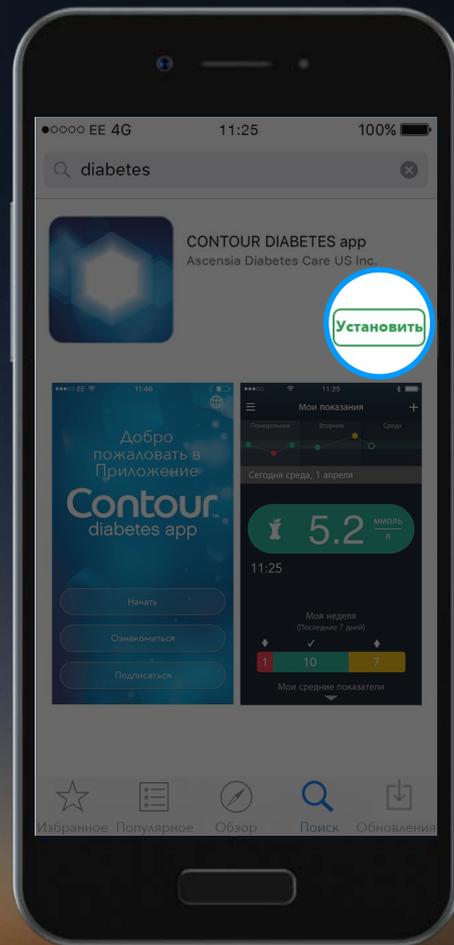


Contour[®]
plus **ONE**[™]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

4.

Установка Приложения

Приложение **CONTOUR DIABETES**
начинает устанавливаться

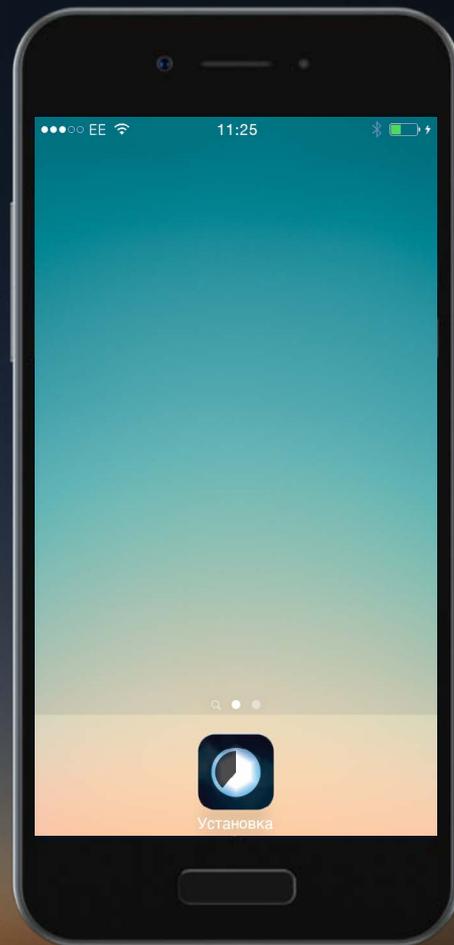

Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

5.

Установка Приложения

Приложение **CONTOUR DIABETES**
установлено.

Все готово для настройки
Приложения **CONTOUR DIABETES.**




Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

5.

Установка Приложения

Приложение **CONTOUR DIABETES**
установлено.

Все готово для настройки
Приложения **CONTOUR DIABETES.**

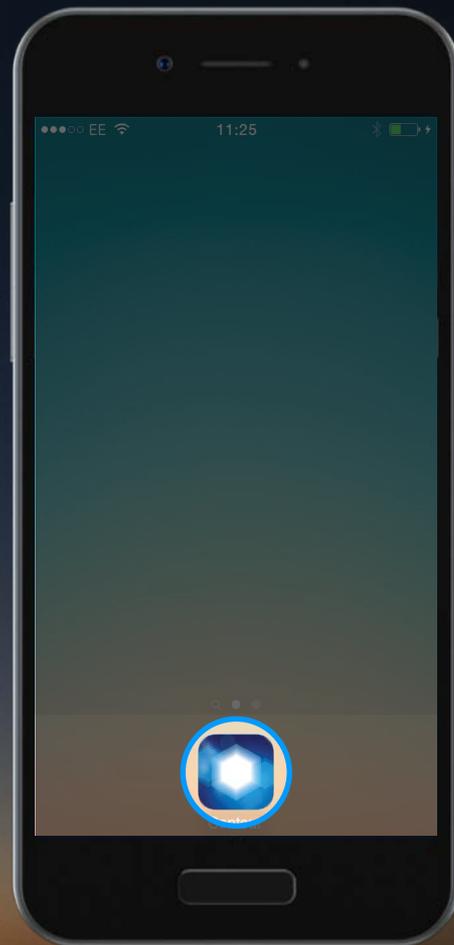

Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

Спросите вашего врача и ознакомьтесь с Руководством пользователя, если возникают вопросы относительно глюкометра **CONTOUR®PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) и Приложения **CONTOUR™DIABETES** (Контур Диабитис). Чтобы получить больше информации и узнать, поставляется ли глюкометр **CONTOUR®PLUS ONE** в РФ, зайдите на www.contourplusone.ru




Установить Приложение



Apple, и логотип Apple являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play является торговой маркой Google Inc.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и CONTOUR являются торговыми марками Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

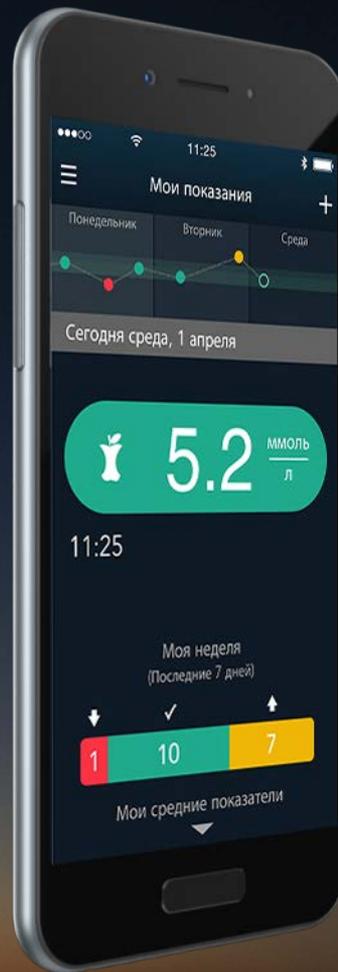

Contour
plus ONE»

Система для измерения
уровня глюкозы в крови



Contour[®] diabetes solutions

