




Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс УАН
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Синхронизация вашего
интеллектуального глюкометра
CONTOUR® PLUS ONE (КОНТУР
ПЛЮС УАН) с Приложением
CONTOUR™ DIABETES
(Контур Диабитис)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

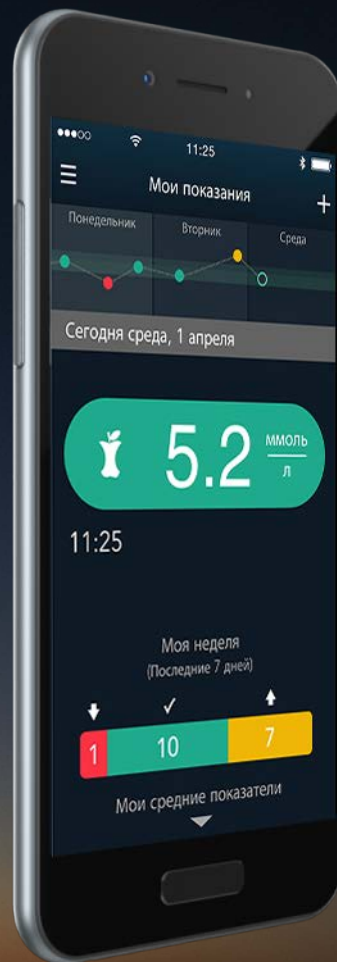

Contour
plus **ONE**


Система для измерения
уровня глюкозы в крови

РУ №ФСЗ 2008/02237 от 30 мая 2017 года

©2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.

www.contourplusone.ru

Включите ваш глюкометр **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН), и он, при наличии соединения Bluetooth, синхронизируется с Приложением **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис).

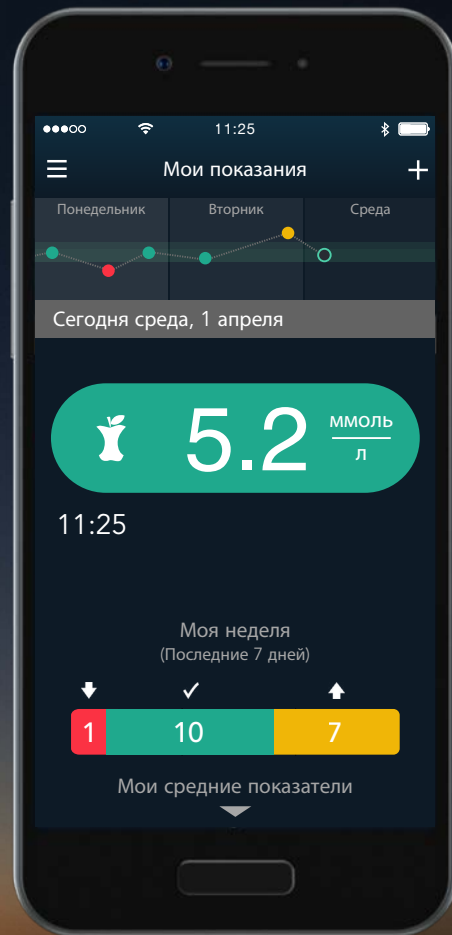

Contour[®]
plus **ONE**[»]


Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “**Настройкам**”, а затем “**Bluetooth**” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

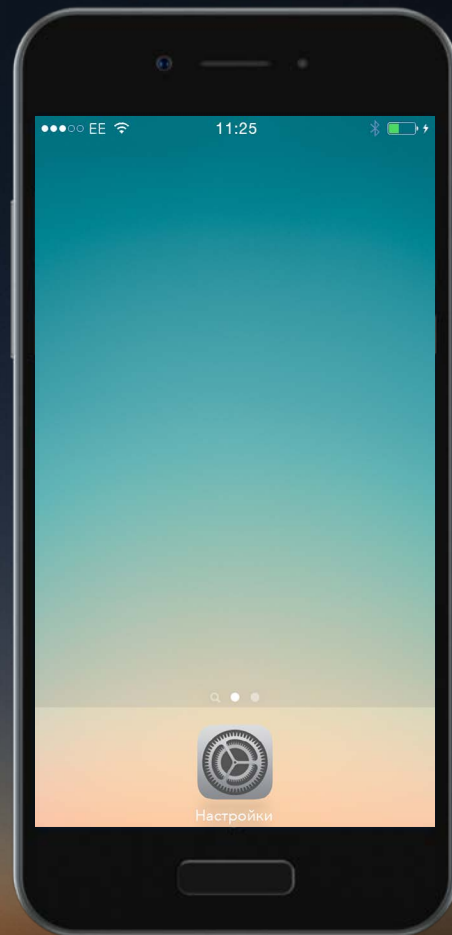


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “Настройкам”, а затем “Bluetooth” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

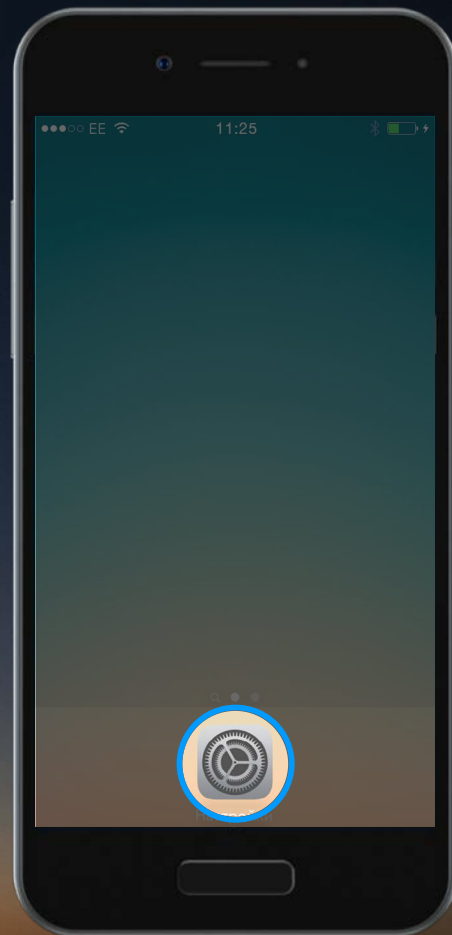


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “Настройкам”, а затем “Bluetooth” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

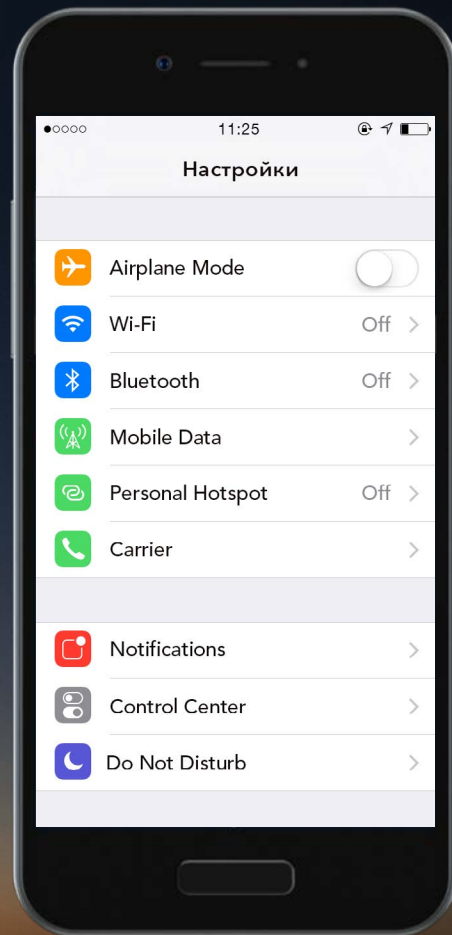


Contour[®]
plus **ONE**[™]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “Настройкам”, а затем “Bluetooth” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

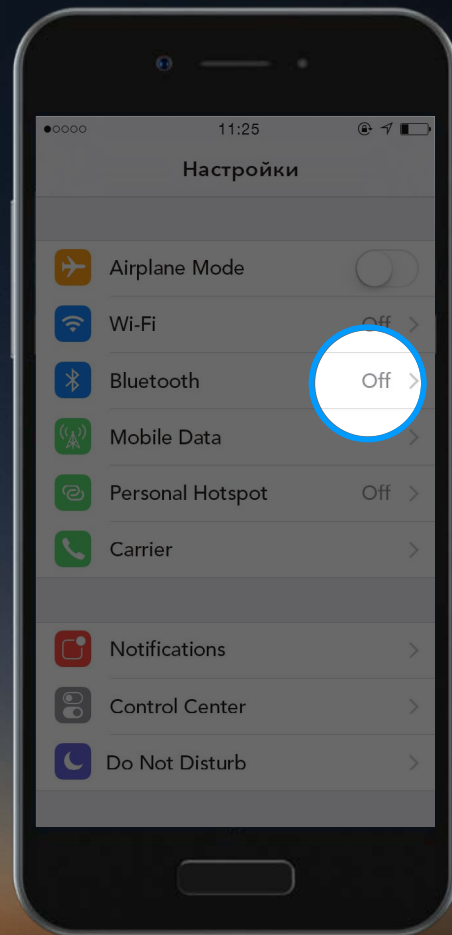

Contour[®]
plus **ONE**[»]


Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “**Настройкам**”, а затем “**Bluetooth**” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

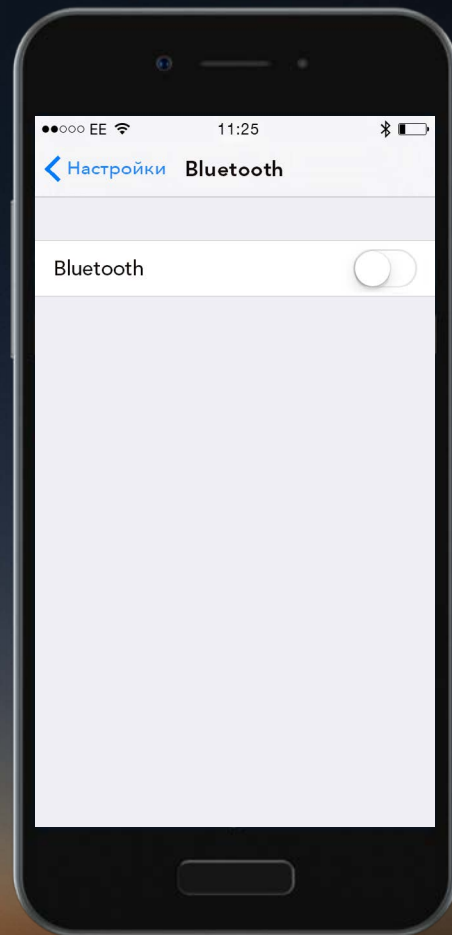


Contour[®]
plus **ONE**
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

1.

Синхронизация вашего глюкометра

Для подключения вашего глюкометра **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) включите на вашем мобильном устройстве Bluetooth.

Перейдите к “Настройкам”, а затем “Bluetooth” и коснитесь “кнопки-переключателя”, чтобы включить Bluetooth.

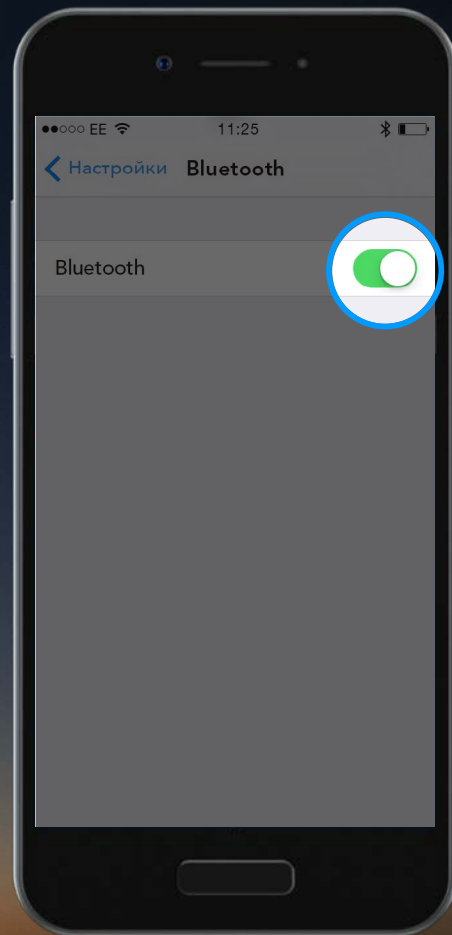

Contour[®]
plus **ONE**
Система для измерения
уровня глюкозы в крови


2.

Синхронизация вашего глюкометра

В Приложении **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис), после того как Вы создадите аккаунт, Вас попросят произвести синхронизацию с глюкометром.

Теперь все готово для синхронизации вашего глюкометра. Выключите глюкометр и поднесите его к вашему мобильному устройству.

Выберите “Продолжить”.

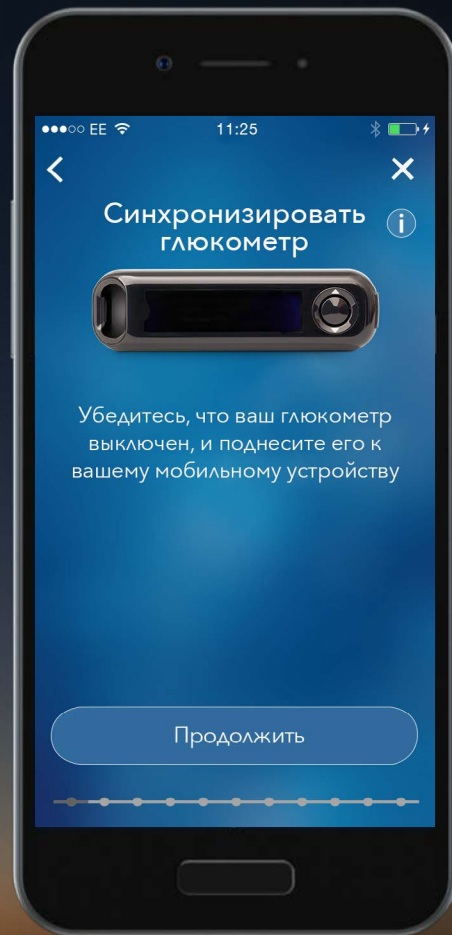

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови


2.

Синхронизация вашего глюкометра

В Приложении **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис), после того как Вы создадите аккаунт, Вас попросят произвести синхронизацию с глюкометром.

Теперь все готово для синхронизации вашего глюкометра. Выключите глюкометр и поднесите его к вашему мобильному устройству.

Выберите **“Продолжить”**.

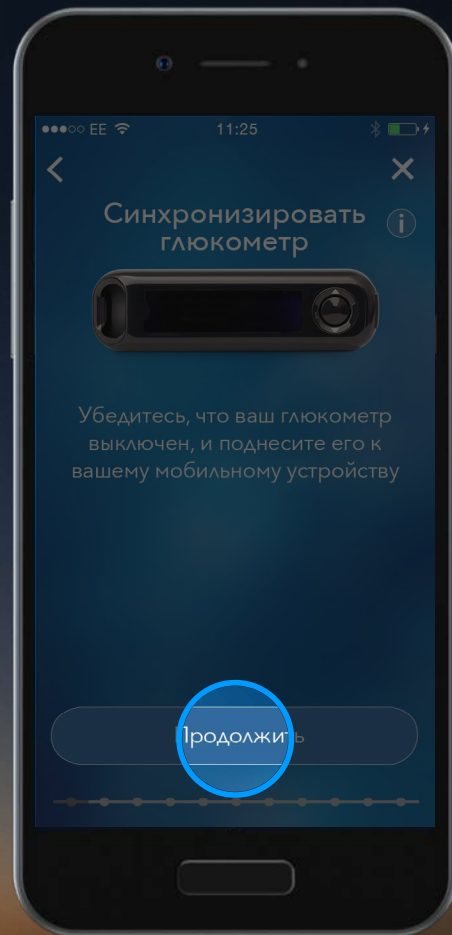


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Синхронизация вашего глюкометра

Нажмите и удерживайте центральную кнопку на вашем глюкометре **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН), не отпускайте до тех пор, пока порт для тест-полосок не начнет мигать синим.

Выберите “Продолжить”.

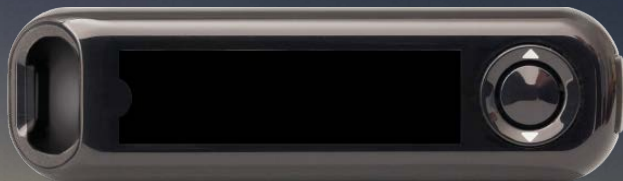

Contour[®]
plus **ONE**[»]

Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Синхронизация вашего глюкометра

Нажмите и удерживайте центральную кнопку на вашем глюкометре **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН), не отпускайте до тех пор, пока порт для тест-полосок не начнет мигать синим.

Выберите “Продолжить”.



Contour[®]
plus **ONE**[»]


Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Синхронизация вашего глюкометра

Нажмите и удерживайте центральную кнопку на вашем глюкометре **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН), не отпускайте до тех пор, пока порт для тест-полосок не начнет мигать синим.

Выберите “Продолжить”.

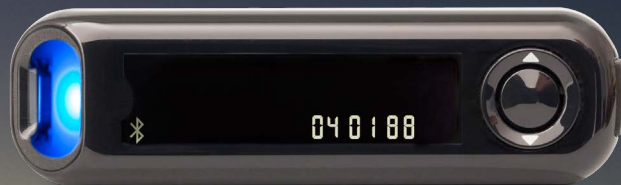


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

3.

Синхронизация вашего глюкометра

Нажмите и удерживайте центральную кнопку на вашем глюкометре **CONTOUR PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН), не отпускайте до тех пор, пока порт для тест-полосок не начнет мигать синим.

Выберите “Продолжить”.

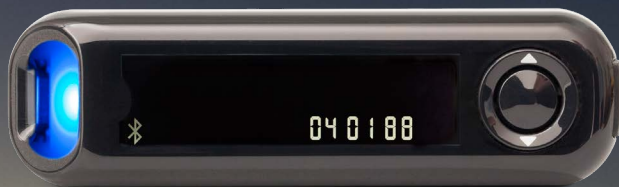

Contour[®]
plus **ONE**[»]

Система для измерения
уровня глюкозы в крови



4.

Синхронизация вашего глюкометра

Выберите серийный номер вашего глюкометра.

Серийный номер вашего глюкометра указан на ярлыке на задней стороне глюкометра.

Выберите “Продолжить”.

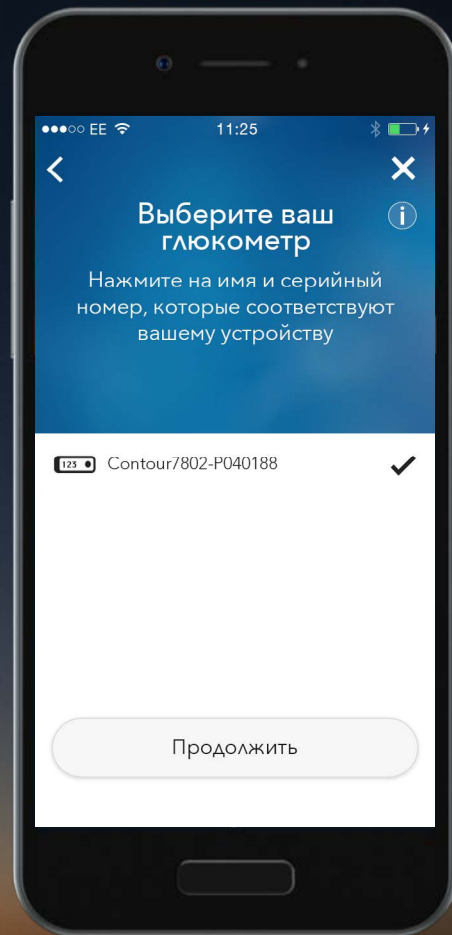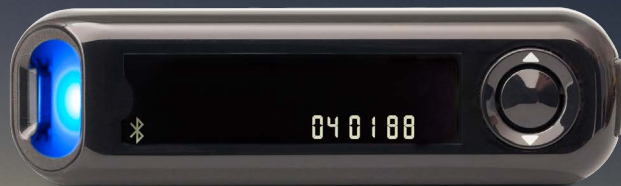

Contour[®]
plus ONE[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови



4.

Синхронизация вашего глюкометра

Выберите серийный номер вашего глюкометра.

Серийный номер вашего глюкометра указан на ярлыке на задней стороне глюкометра.

Выберите **“Продолжить”**.

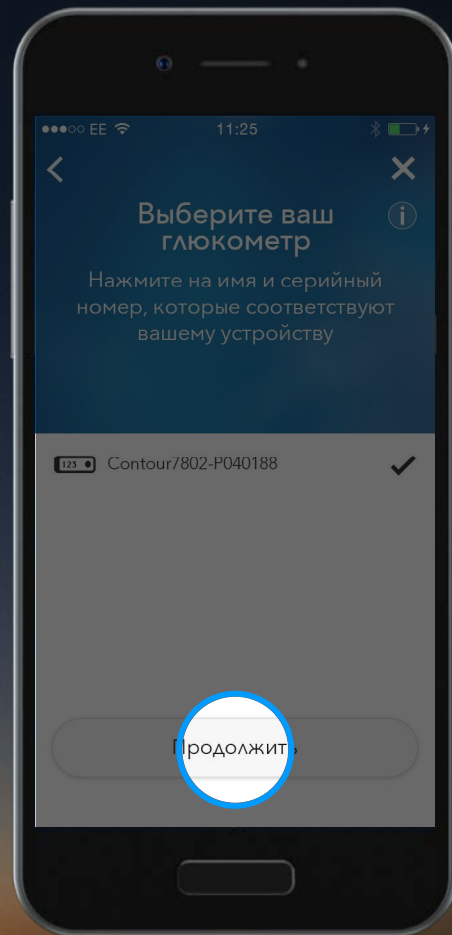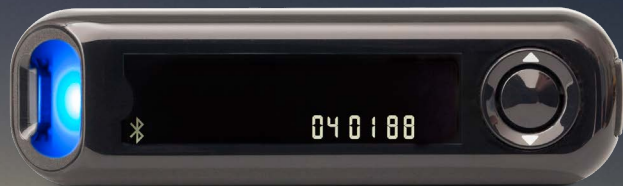


Contour[®]
plus ONE[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

5.

Синхронизация вашего глюкометра

Приложение **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис) подключается к Вашему глюкометру.


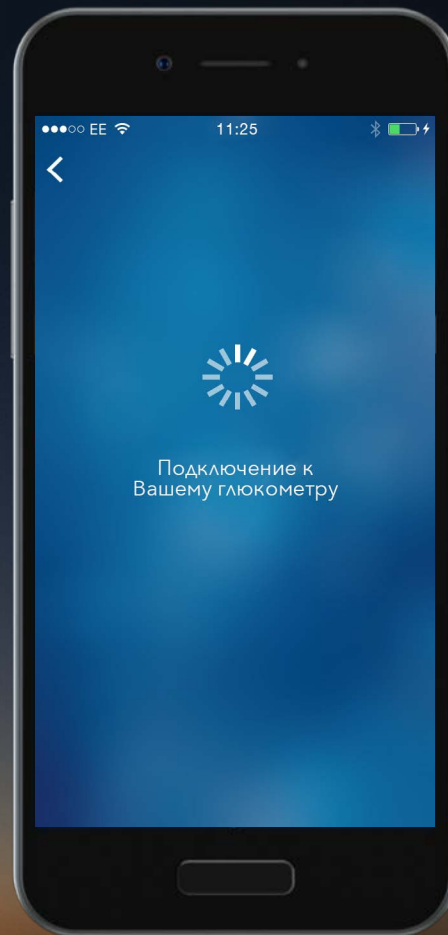


Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

6.

Синхронизация вашего глюкометра

Выберите “Синхронизировать” для подтверждения запроса на синхронизацию.

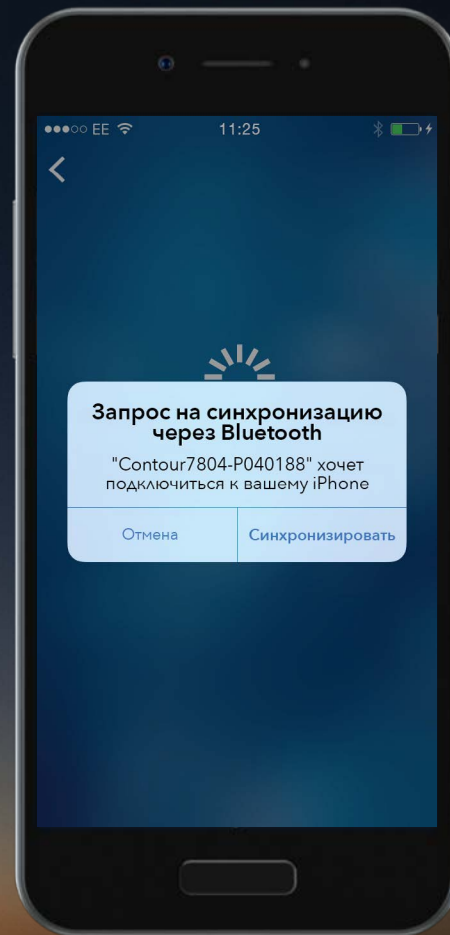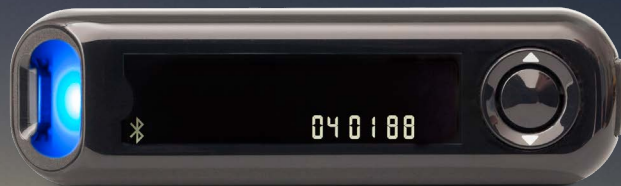



Contour[®]
plus ONE[»]

Система для измерения
уровня глюкозы в крови

6.

Синхронизация вашего глюкометра

Выберите “Синхронизировать” для подтверждения запроса на синхронизацию.

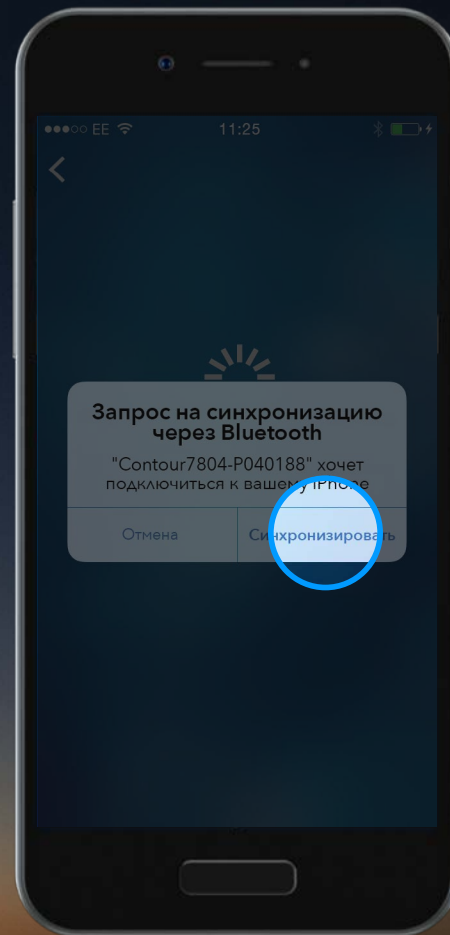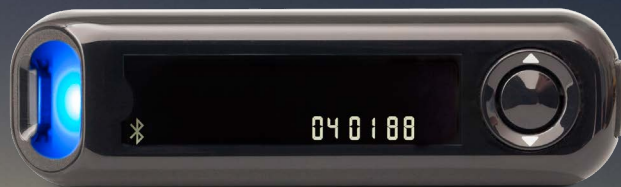



Contour[®]
plus ONE[»]

Система для измерения
уровня глюкозы в крови

6.

Синхронизация вашего глюкометра

Выберите “Синхронизировать” для подтверждения запроса на синхронизацию.

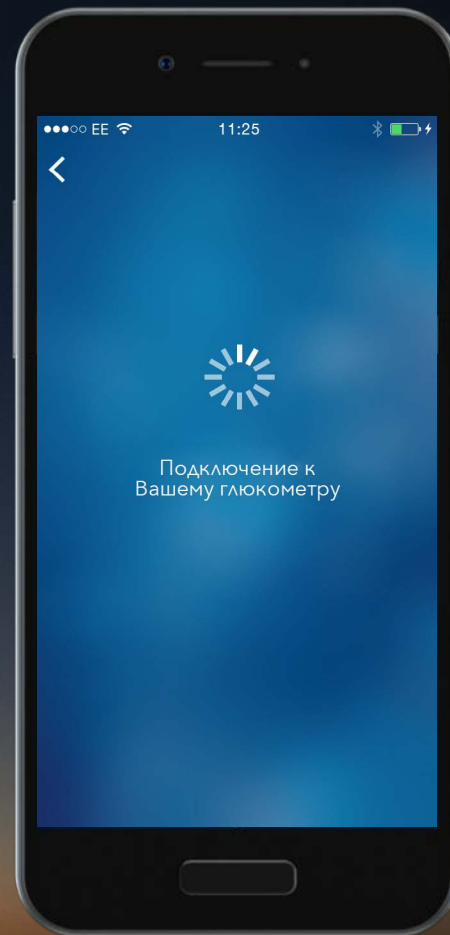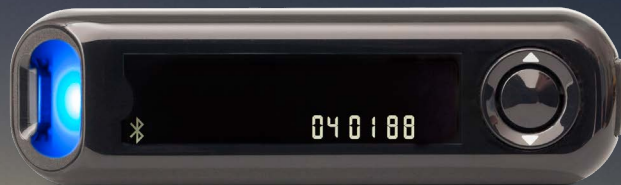


Contour[®]
plus ONE[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

7.

Синхронизация вашего глюкометра

Когда синхронизация глюкометра выполнена, выберите “Продолжить”.

Теперь Вы можете настроить ваше Приложение **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис).

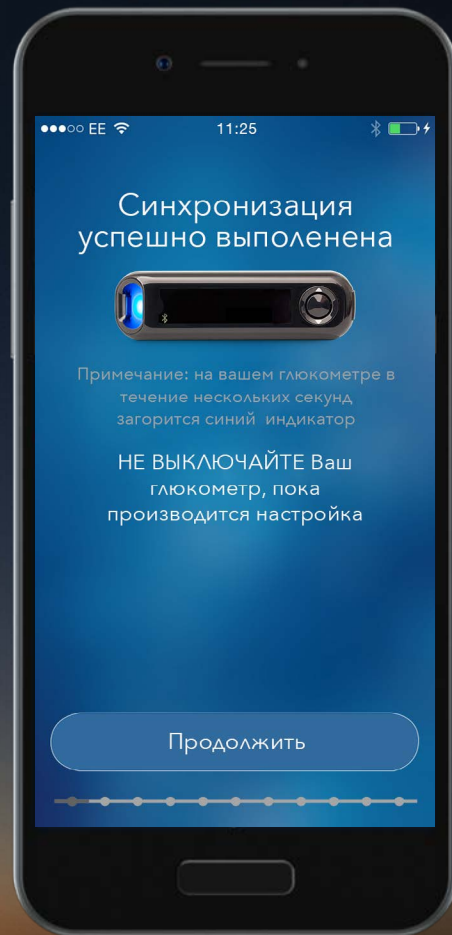


Contour[®]
plus ONE[»]
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

7.

Синхронизация вашего глюкометра

Когда синхронизация глюкометра выполнена, выберите “Продолжить”.

Теперь Вы можете настроить ваше Приложение **CONTOUR DIABETES** (Контур Диабитис).

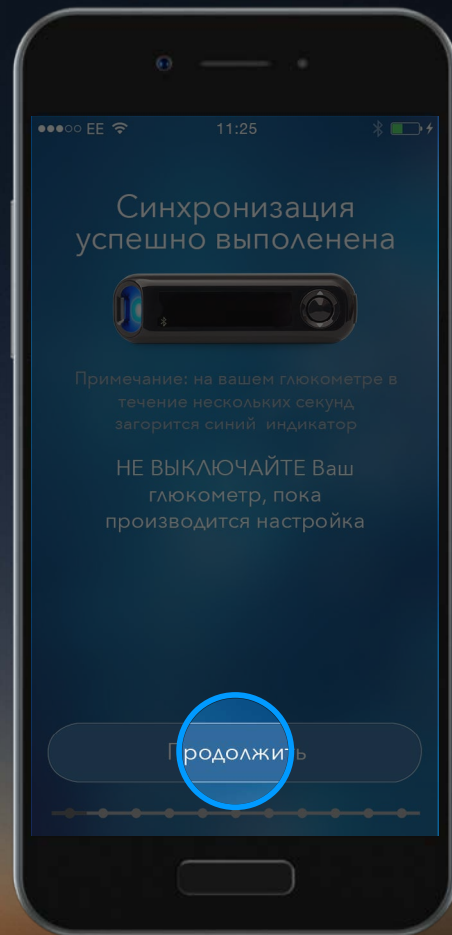

Contour[®]
plus **ONE**»
Система для измерения
уровня глюкозы в крови

Спросите вашего врача и ознакомьтесь с Руководством пользователя, если возникают вопросы относительно глюкометра **CONTOUR®PLUS ONE** (КОНТУР ПЛЮС УАН) и Приложения **CONTOUR™DIABETES** (Контур Диабитис). Чтобы получить больше информации и узнать, поставляется ли глюкометр **CONTOUR®PLUS ONE** в РФ, зайдите на www.contourplusone.ru




Установить Приложение



Apple, и логотип Apple являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play является торговой маркой Google Inc.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и CONTOUR являются торговыми марками Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

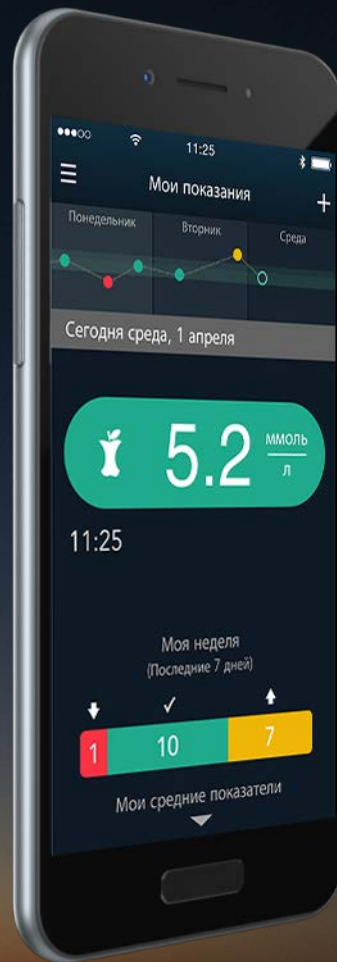

Contour
plus ONE»

Система для измерения
уровня глюкозы в крови



Contour[®] diabetes solutions

