


Contour[®] plus ONE[»]

КОНТУР[®]Плюс УАН
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Создание **планов**
напоминаний об измерениях
с помощью Приложения
CONTOUR™ DIABETES




Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом,
прежде чем внести изменения в лечение
диету или физические упражнения.

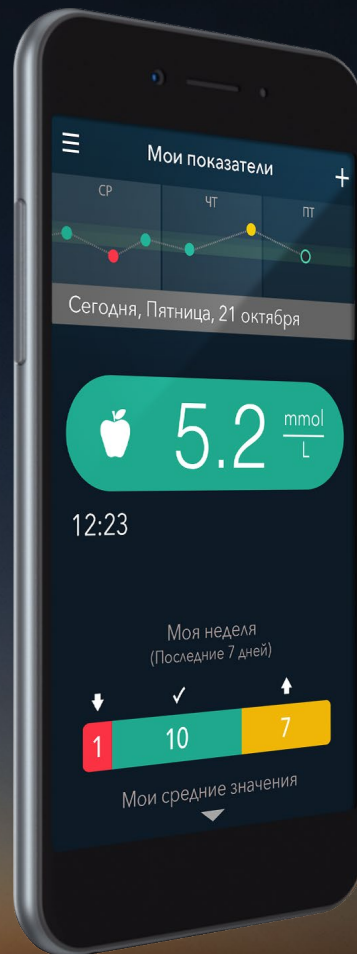

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови


**Планы напоминаний
об измерениях** помогут
оптимизировать процесс
мониторинга, предоставляя
показатели, которые
позволят получить более
содержательный обзор
значений уровня глюкозы
в крови.

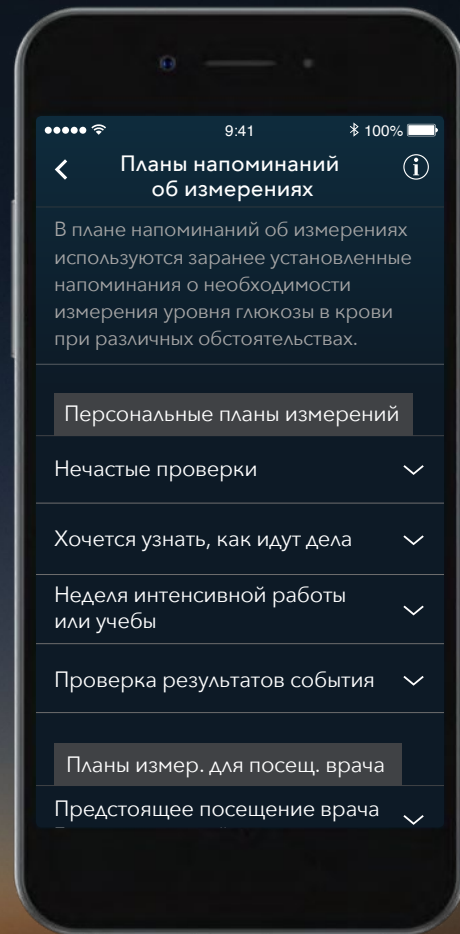

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. План напоминаний об измерениях


План напоминаний об измерениях можно выбрать, кликнув в меню «**Мои напоминания**», а затем знак «+».

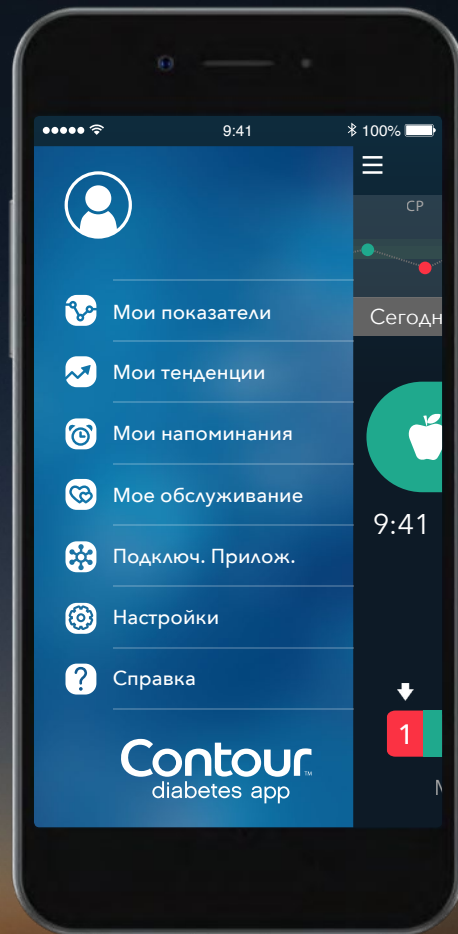

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. План напоминаний об измерениях


План напоминаний об измерениях можно выбрать, кликнув в меню «**Мои напоминания**», а затем знак «**+**».

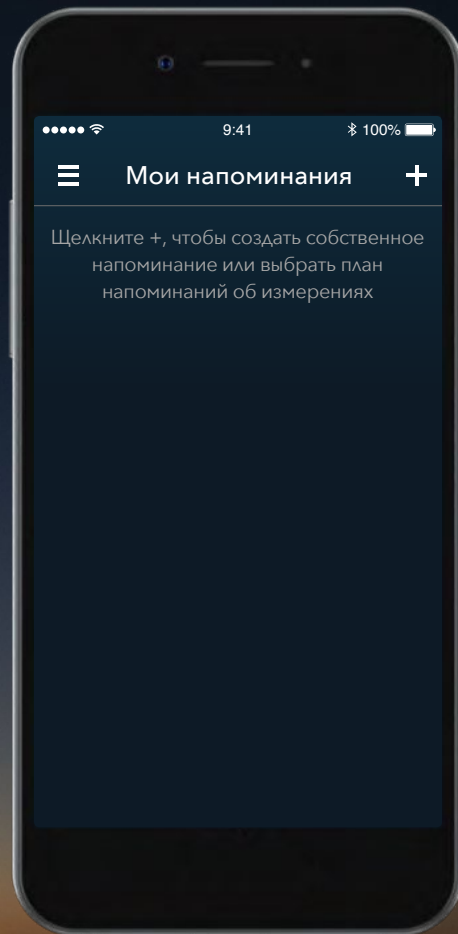

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. План напоминаний об измерениях


Выберите «**План напоминаний об измерениях**», чтобы создать план напоминаний об измерениях.

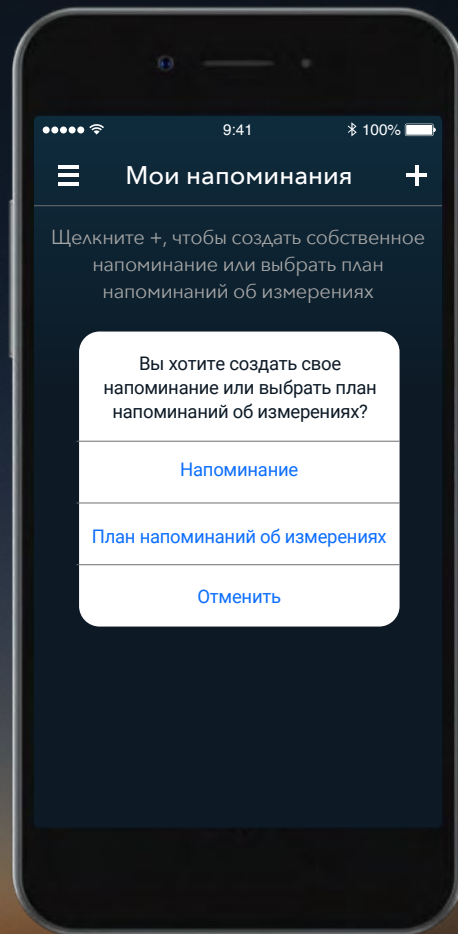

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. План напоминаний об измерениях

Выберите «**План напоминаний об измерениях**», с которым вы собираетесь работать.

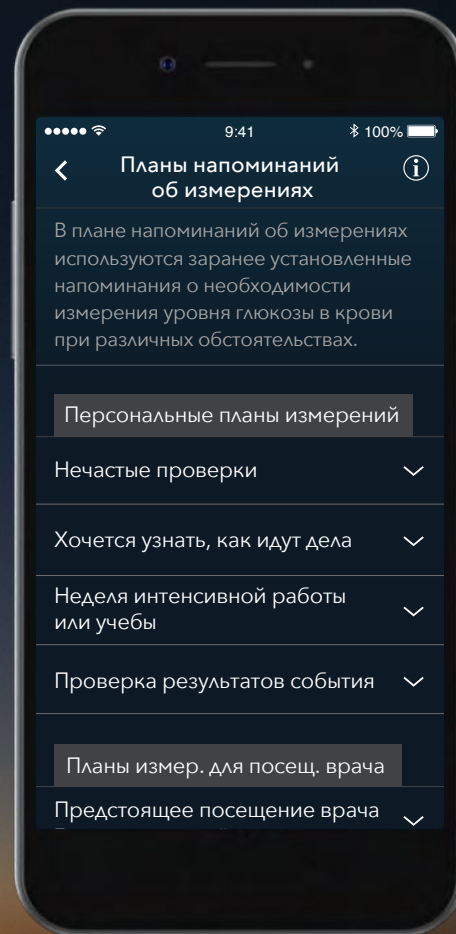


Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. План напоминаний об измерениях

Выберите «**План напоминаний об измерениях**», с которым вы собираетесь работать.

Касание стрелки рядом с планом выведет дополнительную информацию о плане.

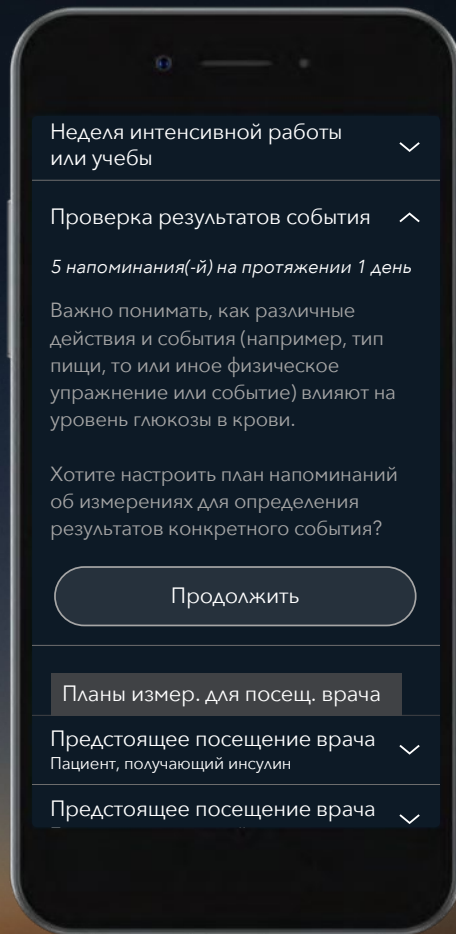


2. План напоминаний об измерениях

Выберите «**План напоминаний об измерениях**», с которым вы собираетесь работать.


Касание стрелки рядом с планом выведет дополнительную информацию о плане.

Выберите «**Продолжить**», чтобы настроить выбранный план напоминаний об измерениях.

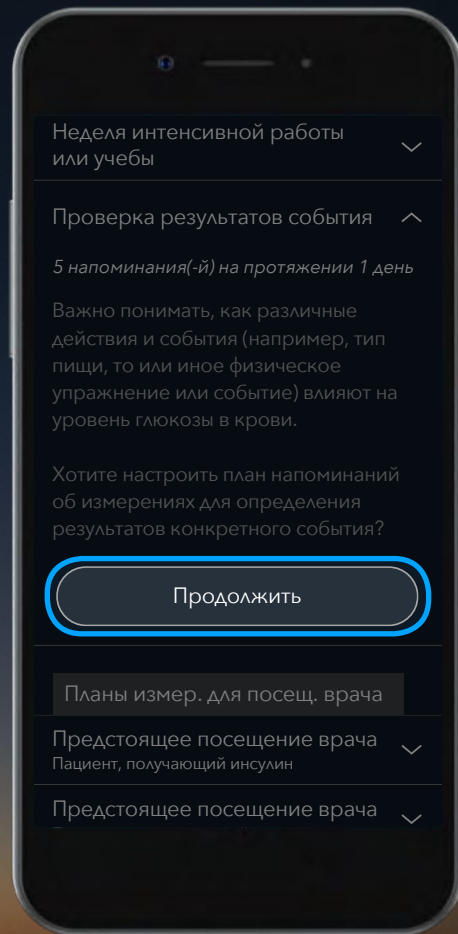

3. План напоминаний об измерениях


Коснитесь кнопки даты и времени, чтобы задать дату и время события, которое вы хотите отслеживать.

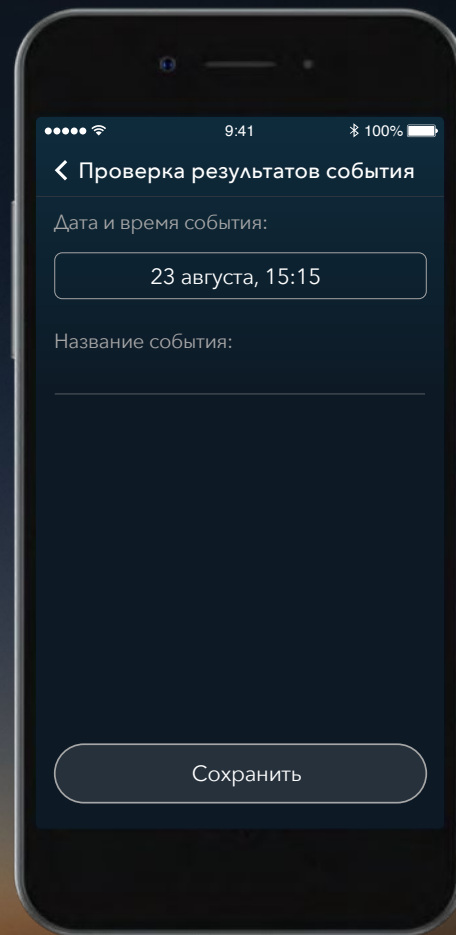

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. План напоминаний об измерениях


Коснитесь кнопки даты и времени, чтобы задать дату и время события, которое вы хотите отслеживать.

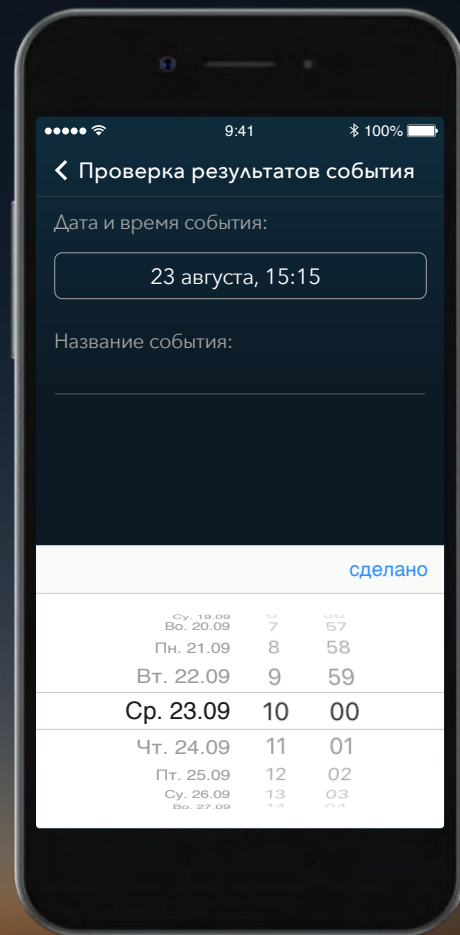

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. План напоминаний об измерениях


Коснитесь области «Название события», чтобы открыть клавиатуру и задать название вашего события.

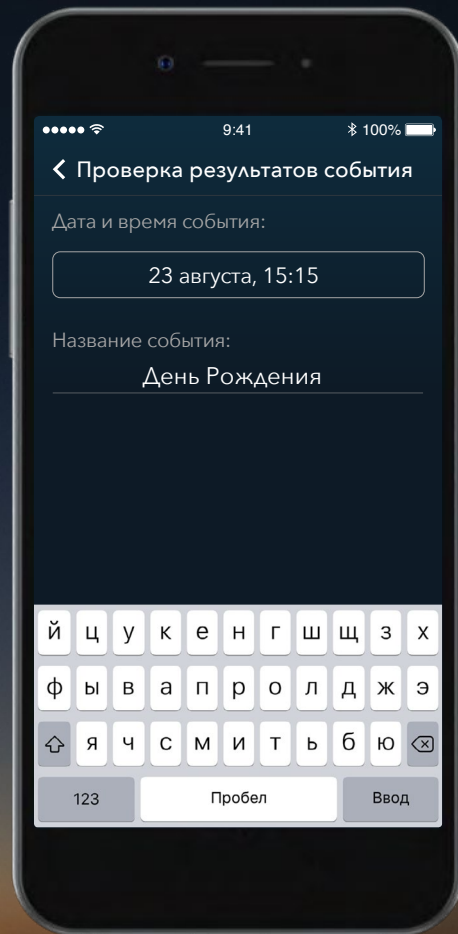

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. | План напоминаний об измерениях

Коснитесь кнопки «Сохранить».

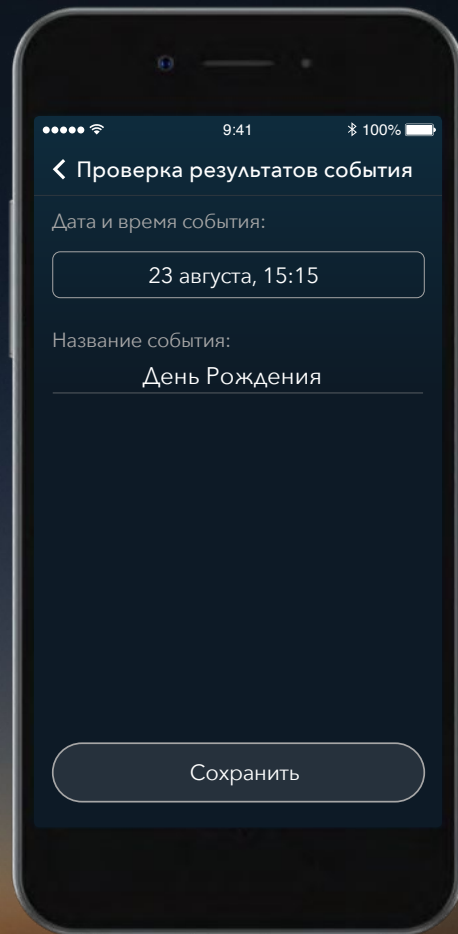


Contour[®]
plus ONE[®]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. План напоминаний об измерениях

Коснитесь кнопки «**Сохранить**».

После этого ваш план напоминаний об измерениях будет активирован.

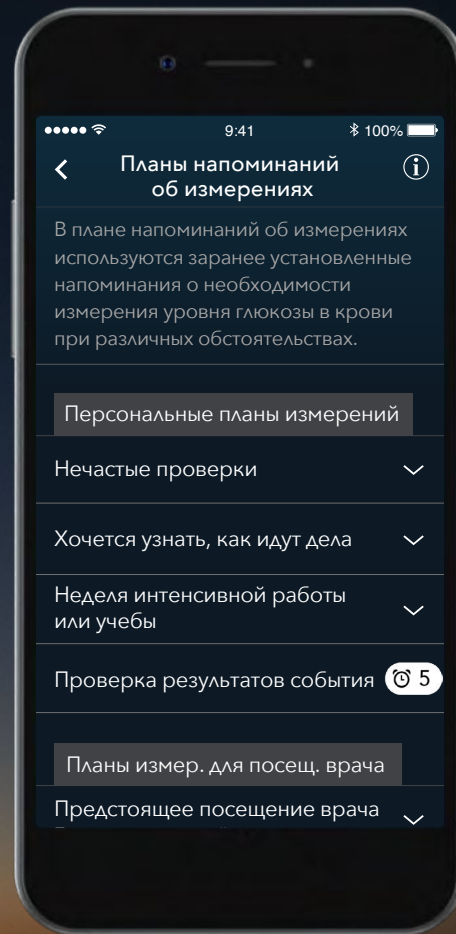

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

При наличии вопросов об интеллектуальном глюкометре **CONTOUR®PLUS ONE** или Приложении **CONTOUR™DIABETES** обратитесь к своему врачу или к руководству пользователя глюкометра.

За дополнительной информацией зайдите на сайт:
www.diabetes.ascensia.com.ru




Гипотетические данные пациента представлены только в демонстрационных целях. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем внести изменения в лечение диету или физические упражнения.



Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков в настоящем документе осуществляется в соответствии с лицензией. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и Contour (Контур), являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ).

Дата подготовки: Февраль 2018 г. Код: G.DC.10.2017.52580

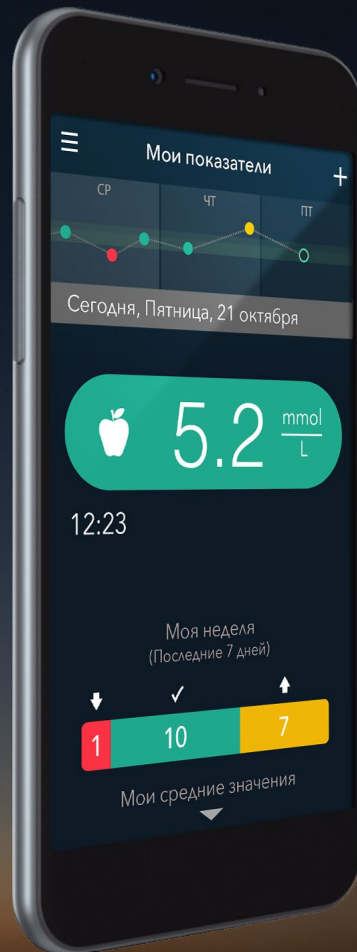

**Contour®
plus ONE**
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Contour[®]
diabetes solutions