


Contour[®] plus ONE[»]

КОНТУР[®]Плюс УАН
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Использование функции «Мои тенденции» с помощью Приложения **CONTOUR™ DIABETES**




Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом,
прежде чем внести изменения в лечение
диету или физические упражнения.

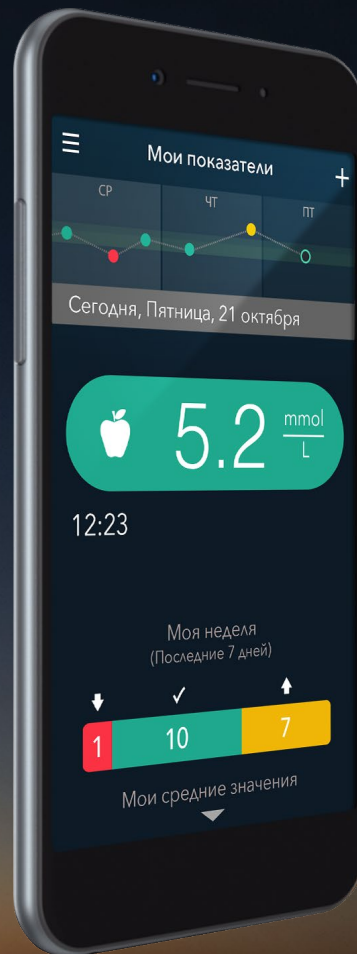


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Функция «**Мои тенденции**» определяет конкретные тенденции и характеристики показателей уровня глюкозы в крови и сообщает о возможных причинах их появления.

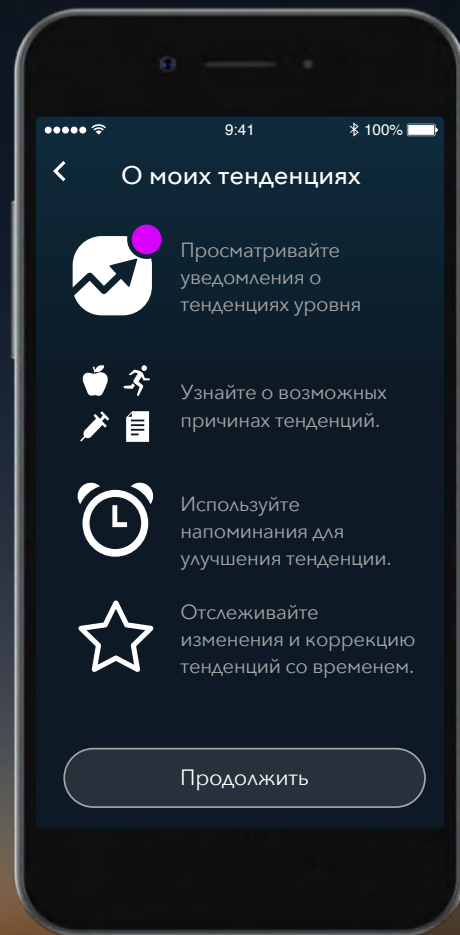

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови


Функция «**Мои тенденции**» определяет конкретные тенденции и характеристики показателей уровня глюкозы в крови и сообщает о возможных причинах их появления.

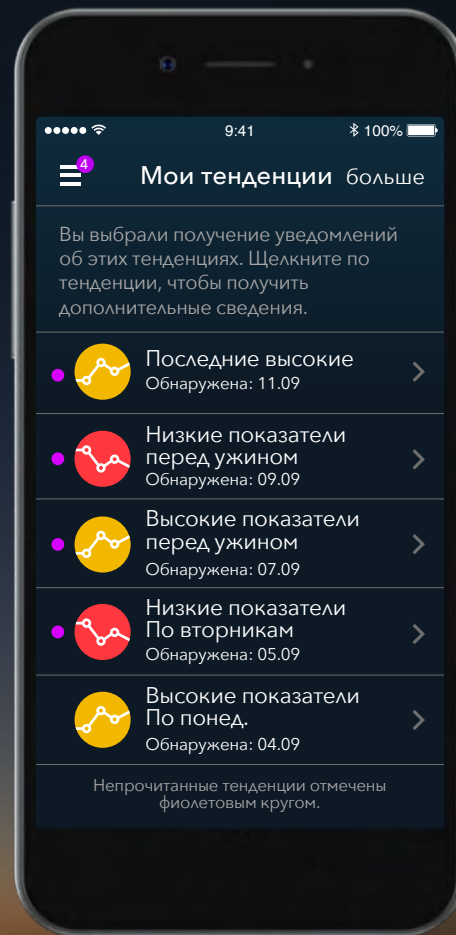

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. Мои тенденции


Выберите в меню пункт
«Мои тенденции».

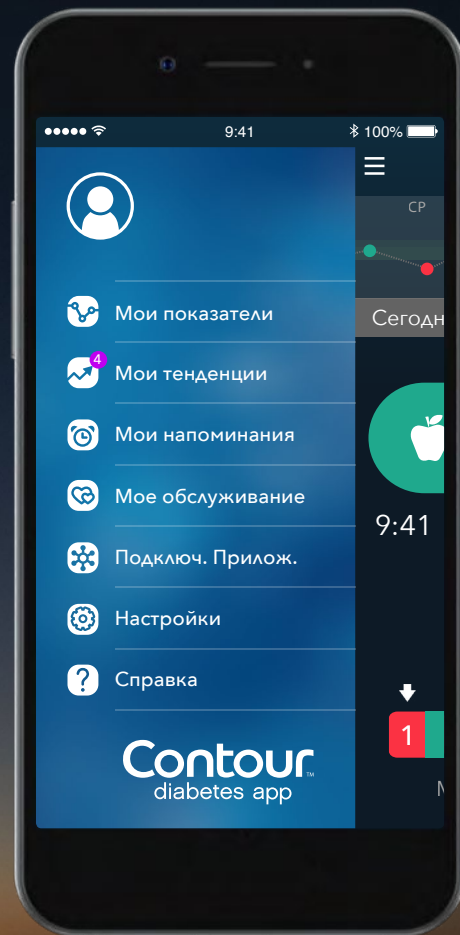

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. Мои тенденции


На экран «**Мои тенденции**» будут выведены тенденции, для которых были заданы уведомления. Непрочитанные тенденции отмечаются фиолетовым кружком.

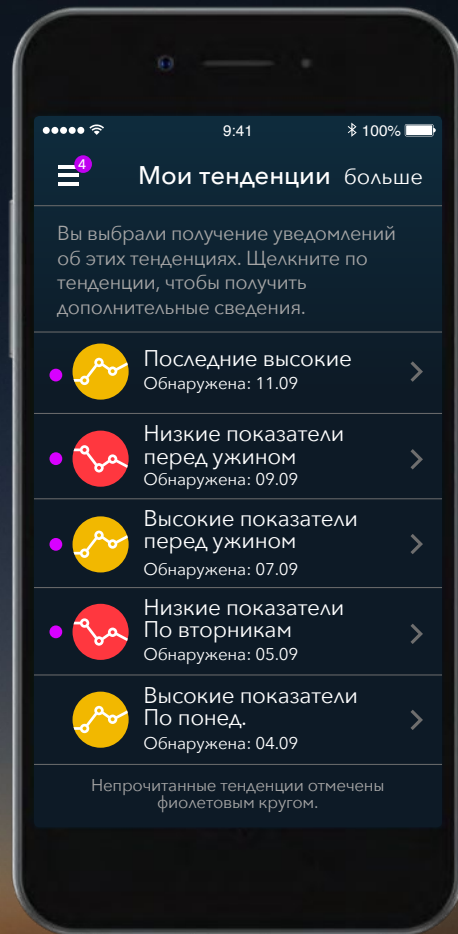

Contour
plus ONE
Контур® Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. Мои тенденции


Коснитесь кнопки «**больше**», чтобы изменить выбранные тенденции или просмотреть историю тенденций.

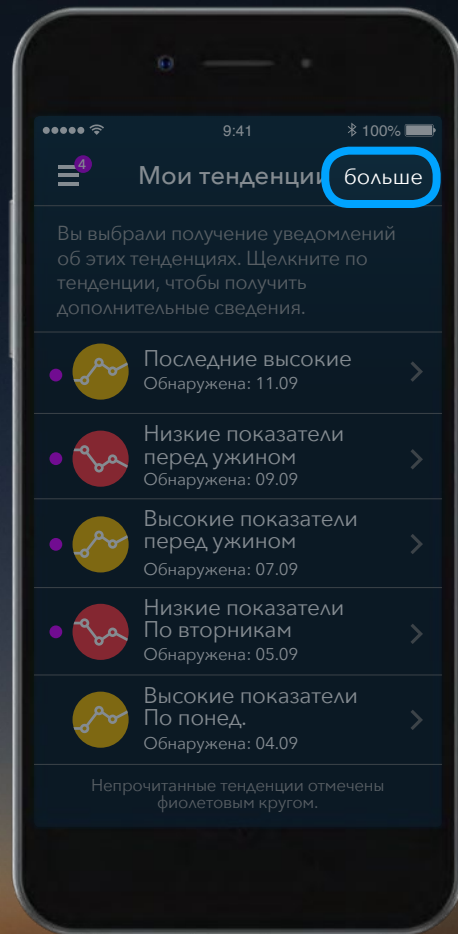

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. Мои тенденции


Коснитесь кнопки «**Выбор тенденций**», чтобы выбрать тенденции для получения уведомлений.

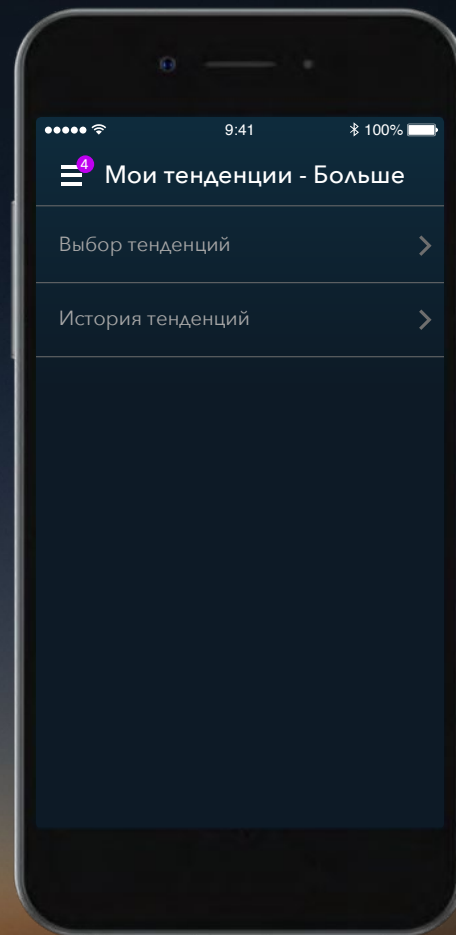

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. Мои тенденции


Коснитесь кнопки «**Выбор тенденций**», чтобы выбрать тенденции для получения уведомлений.

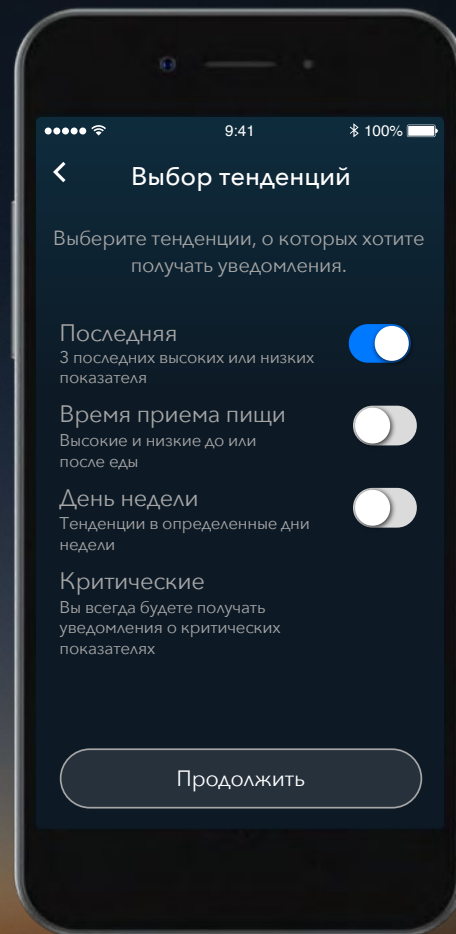

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. Мои тенденции

Коснитесь кнопки «**Выбор тенденций**», чтобы выбрать тенденции для получения уведомлений.

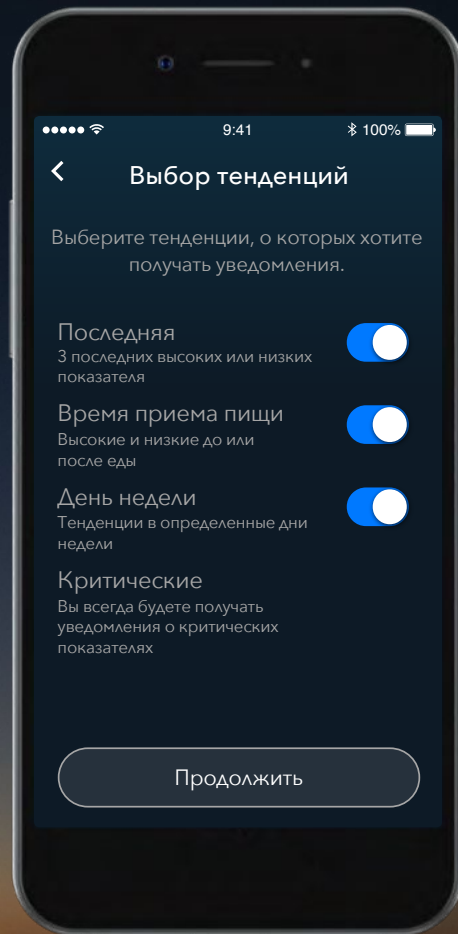


Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Мои тенденции

Все обнаруженные тенденции выводятся в виде списка на экран «**Мои тенденции**».


На экран «**Мои тенденции**» будут выведены тенденции, для которых были заданы уведомления. Непрочитанные тенденции отмечаются фиолетовым кружком.

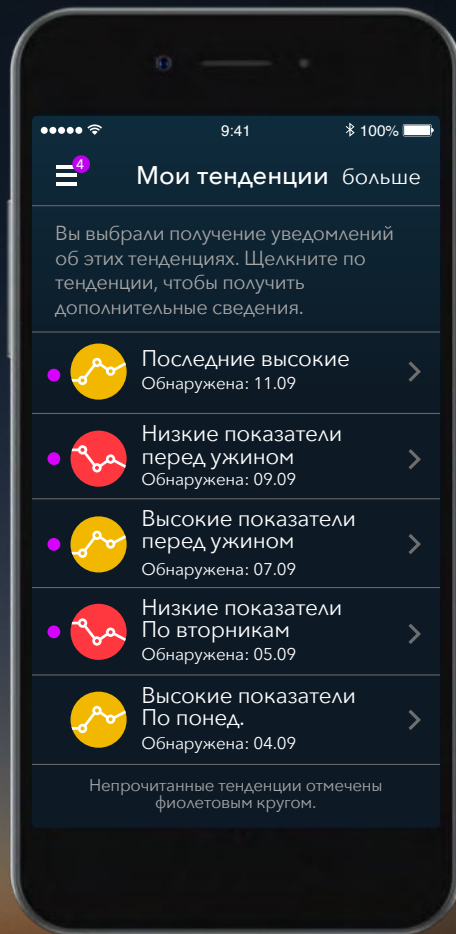

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Мои тенденции


У вас есть возможность получить дополнительную информацию о тенденциях и узнать о возможных причинах.

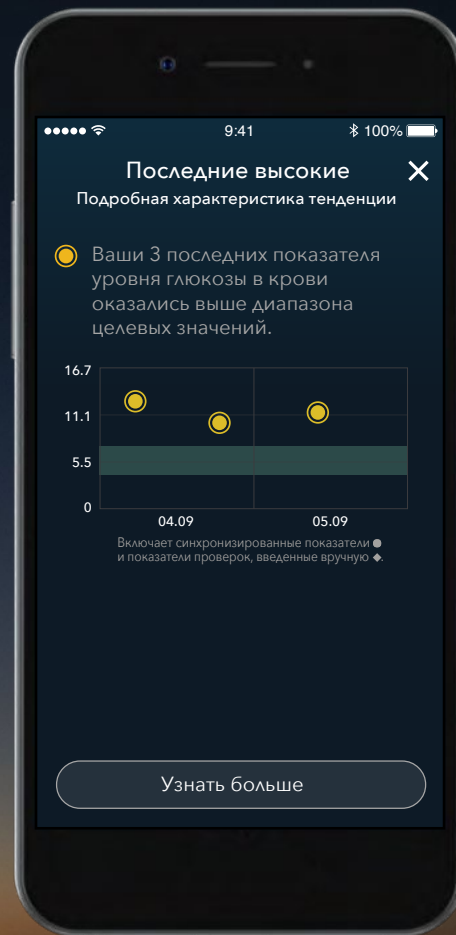

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Мои тенденции


Вы можете узнать, что могло стать причиной появления данной тенденции, и выбрать одну из возможных причин, например, еда, лекарственный препарат или физическая активность.

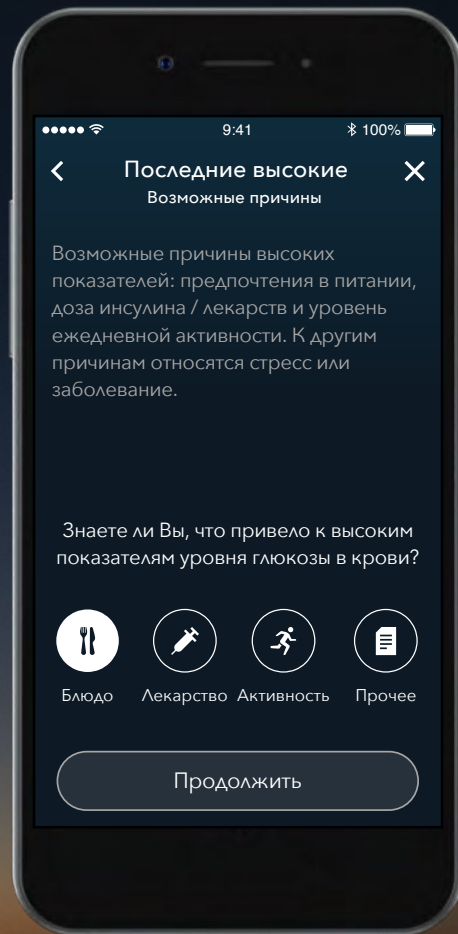

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Мои тенденции


Кроме того, можно задать напоминание, связанное с возможной причиной.

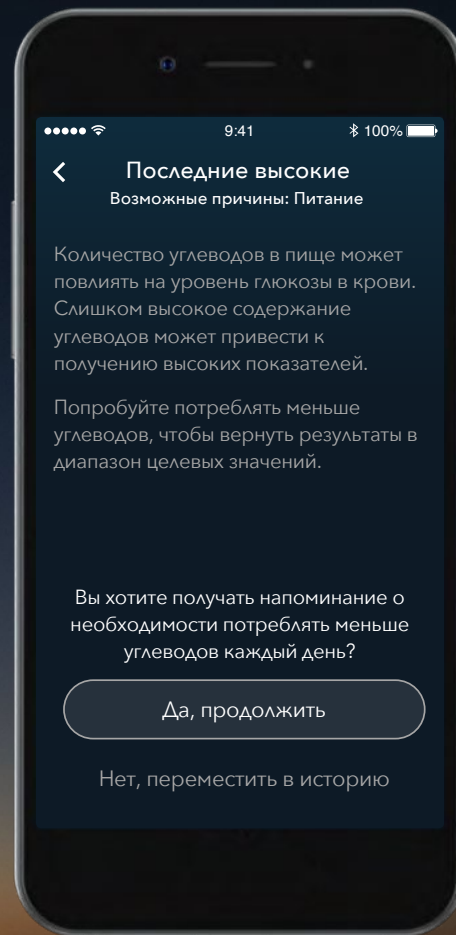

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

5. Мои тенденции


Вы можете в любое время вернуться к какой-либо тенденции через пункт «История тенденций».

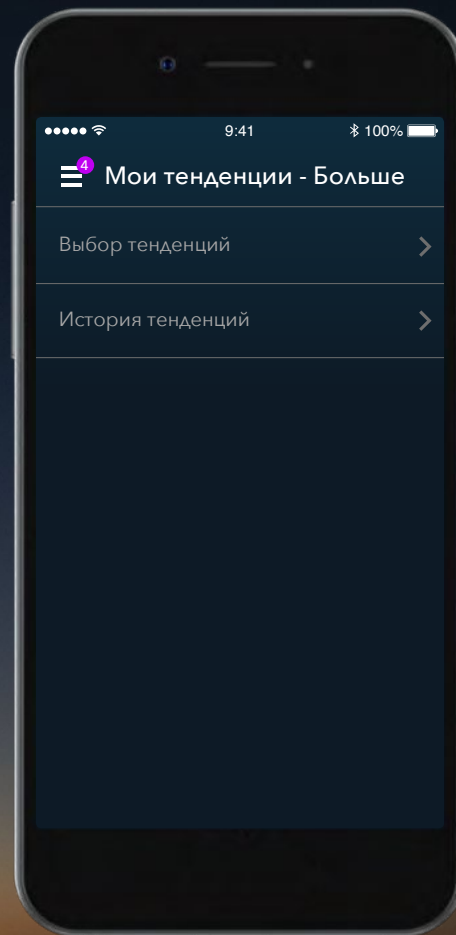

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

5. Мои тенденции


На экране «История тенденций» можно просматривать тенденции, обнаруженные в прошлом, которые уже не активны.

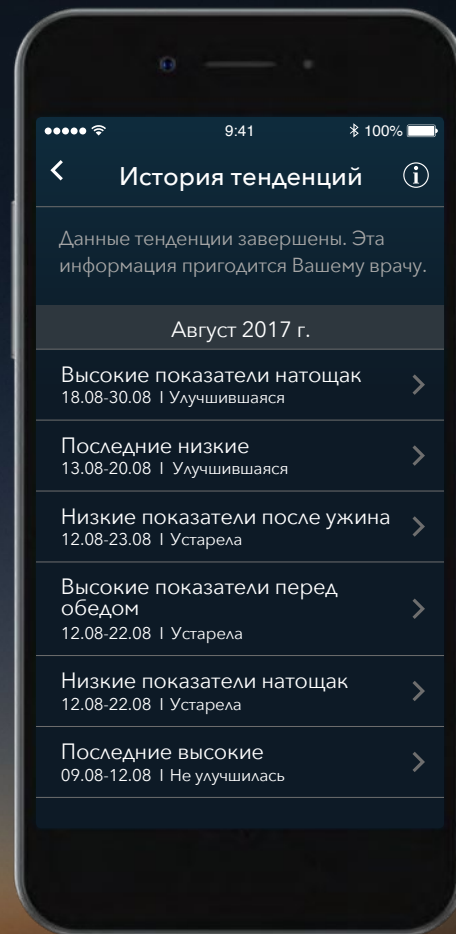

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

5. Мои тенденции

На экране «История тенденций» можно просматривать тенденции, обнаруженные в прошлом, которые уже не активны.

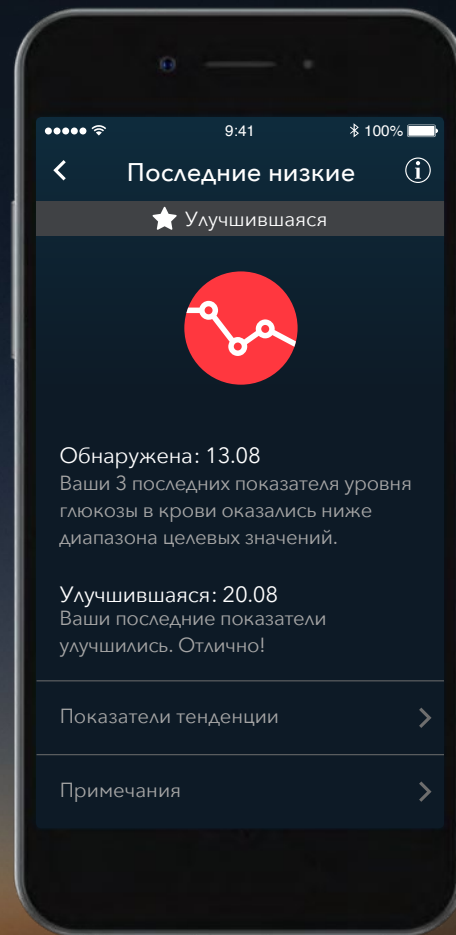

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

При наличии вопросов об интеллектуальном глюкометре **CONTOUR®PLUS ONE** или Приложении **CONTOUR™DIABETES** обратитесь к своему врачу или к руководству пользователя глюкометра.

За дополнительной информацией зайдите на сайт:
www.diabetes.ascensia.com.ru




Гипотетические данные пациента представлены только в демонстрационных целях. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем внести изменения в лечение диету или физические упражнения.



Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков в настоящем документе осуществляется в соответствии с лицензией. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и Contour (Контур), являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ).

Дата подготовки: Февраль 2018 г. Код: G.DC.10.2017.52578

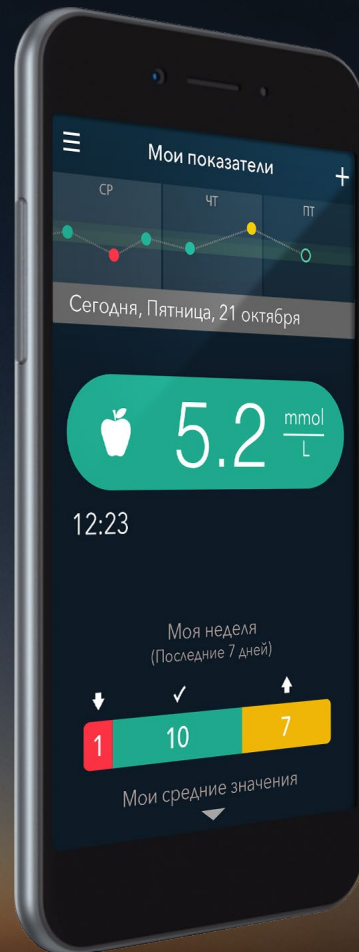

**Contour®
plus ONE**
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Contour[®]
diabetes solutions