


Contour[®] plus ONE[»]

КОНТУР[®]Плюс УАН
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Просмотр тенденций содержания сахара в крови с помощью Приложения **CONTOUR™ DIABETES**




Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом,
прежде чем внести изменения в лечение
диету или физические упражнения.

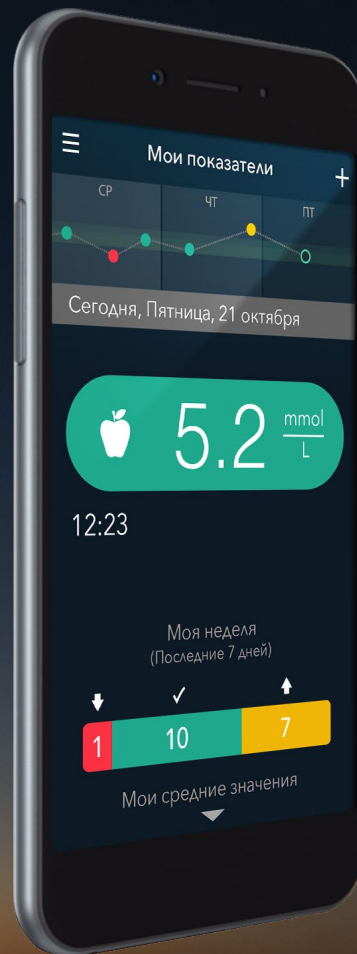

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови


Функция «**Мои тенденции**» определяет конкретные тенденции и характеристики показателей уровня глюкозы в крови и сообщает о возможных причинах их появления.

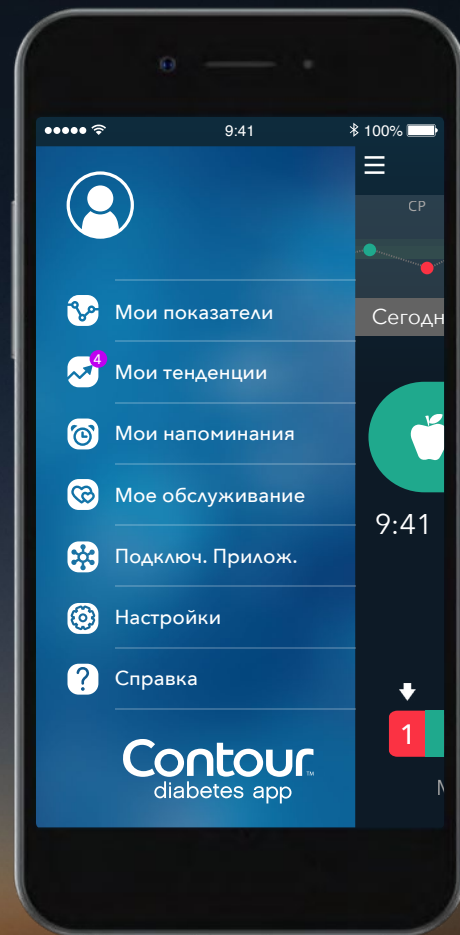

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. Тенденции

При обнаружении тенденции Приложением **CONTOUR DIABETES** вы получите сообщение «**Обнаружена новая тенденция**».

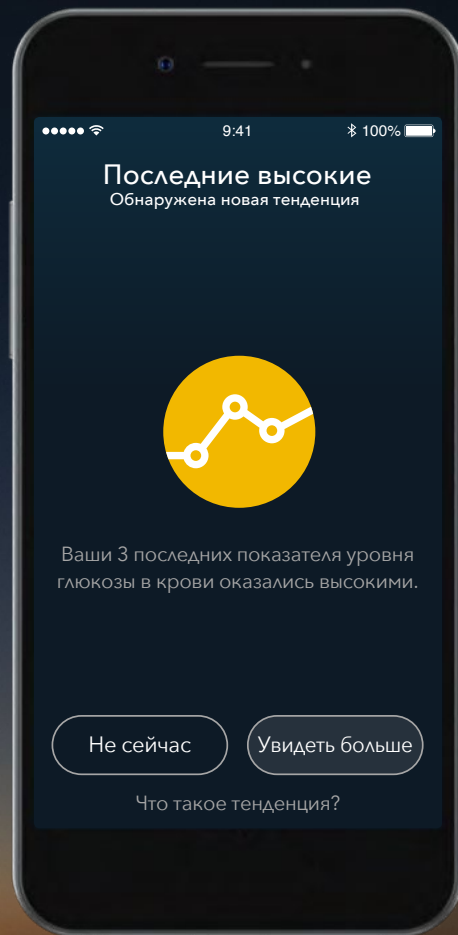


Contour
plus ONE
Контур® Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

1. Тенденции

При обнаружении тенденции Приложением **CONTOUR DIABETES** вы получите сообщение «**Обнаружена новая тенденция**».


Для просмотра дополнительных сведений о тенденции коснитесь кнопки «**Увидеть больше**».

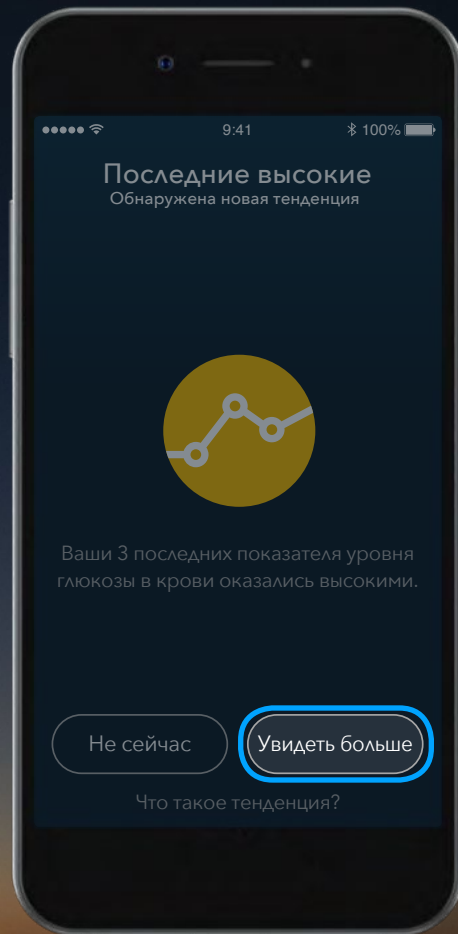

Contour
plus ONE
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. Тенденции

Тенденция «**Последние высокие**» сообщает о том, что последние 3 измерения уровня сахара в крови были выше диапазона ваших целевых значений.

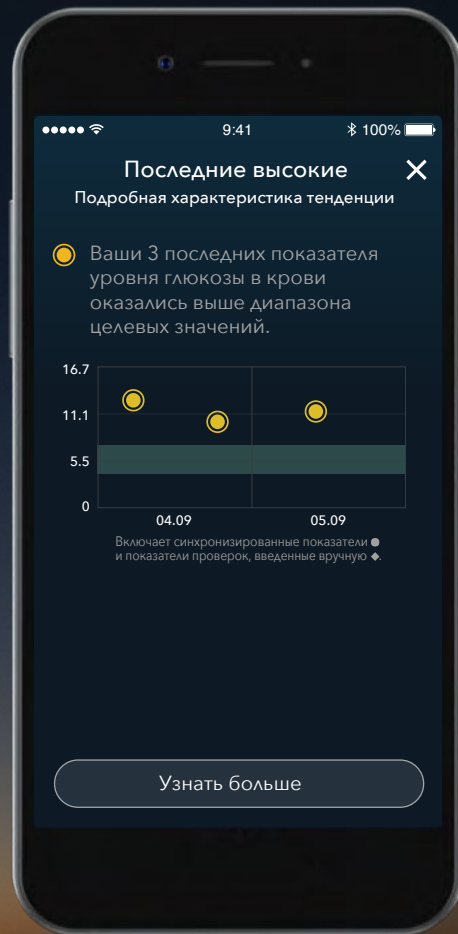


Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

2. Тенденции


Тенденция **«Последние высокие»** сообщает о том, что последние 3 измерения уровня сахара в крови были выше диапазона ваших целевых значений.

Коснитесь кнопки **«Узнать больше»**, чтобы увидеть информацию о возможных причинах.

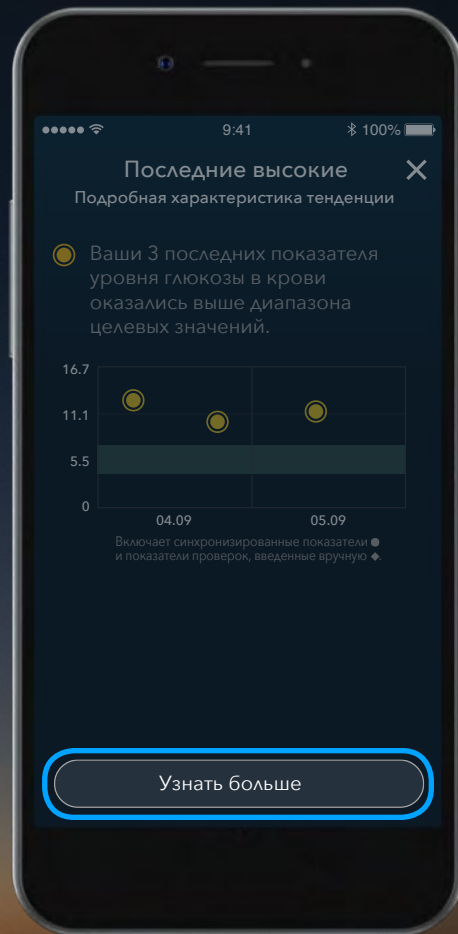

3. Тенденции


Если вы знаете причину высоких показателей уровня сахара в крови, ее можно выбрать здесь.

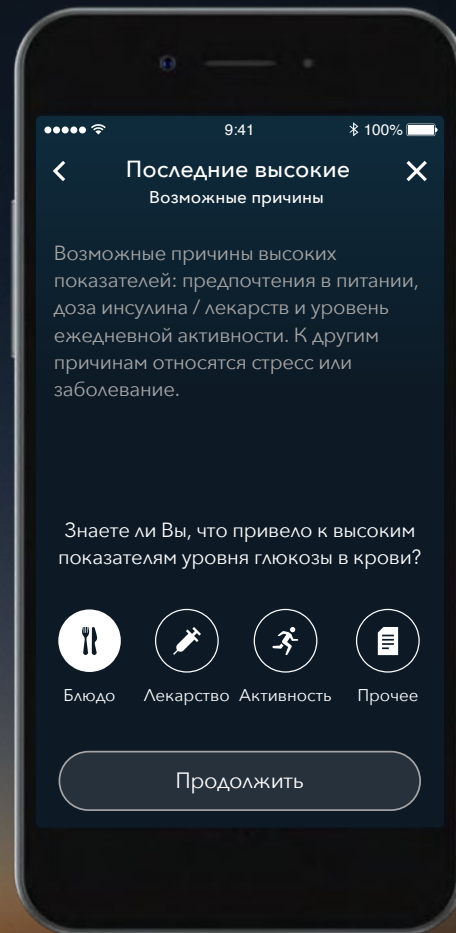

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

3. Тенденции


Если вы знаете причину высоких показателей уровня сахара в крови, ее можно выбрать здесь.

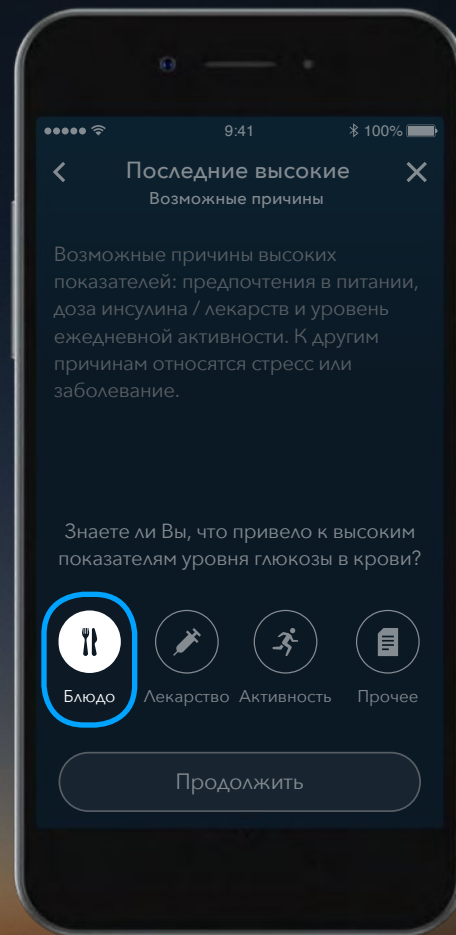

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Тенденции

Приложение **CONTOUR™
DIABETES** предоставляет некоторую информацию о возможных причинах такой тенденции.

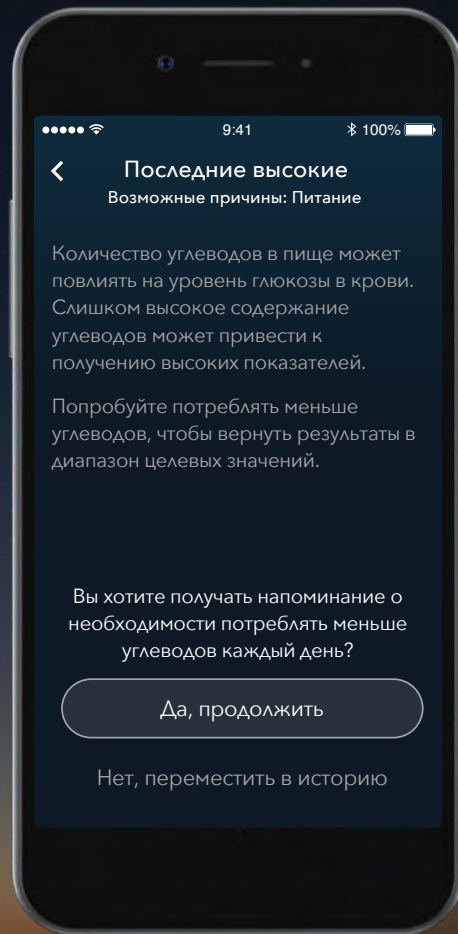


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

4. Тенденции

Приложение **CONTOUR™ DIABETES** предоставляет некоторую информацию о возможных причинах такой тенденции.


Коснитесь кнопки **«Да, продолжить»**, чтобы установить напоминание о необходимости потреблять меньше углеводов каждый день.

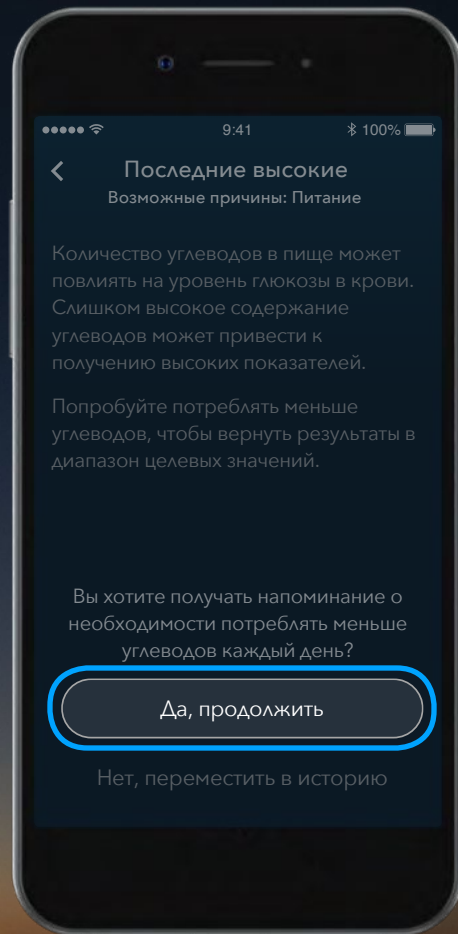

**Contour[®]
plus ONE[™]**
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

5. Тенденции

Используйте функцию прокрутки, чтобы выбрать время получения напоминания о необходимости потреблять меньше углеводов каждый день.

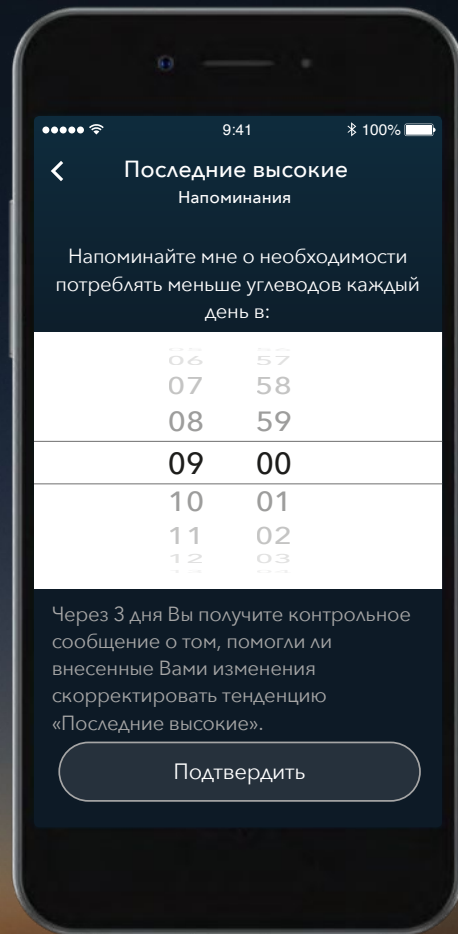


Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

5. Тенденции

Используйте функцию прокрутки, чтобы выбрать время получения напоминания о необходимости потреблять меньше углеводов каждый день.


Коснитесь кнопки «Подтвердить», чтобы установить время.

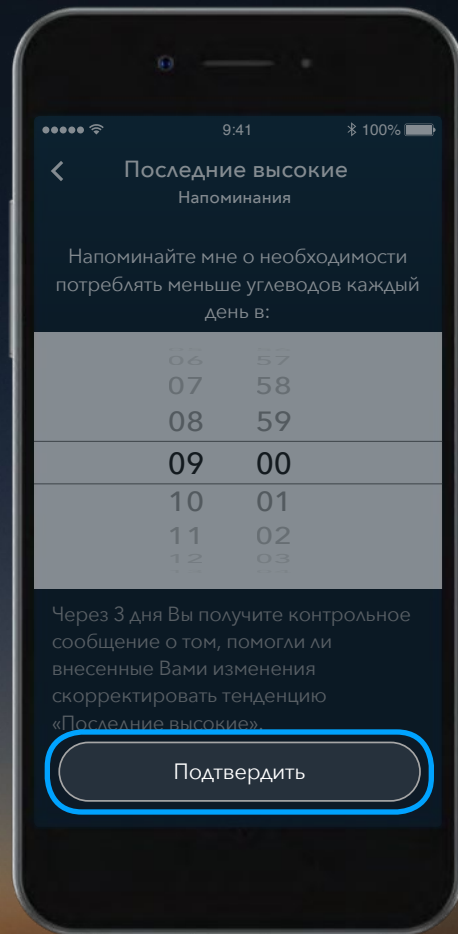

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

6. Тенденции


После выбора времени напоминание появится на экране.

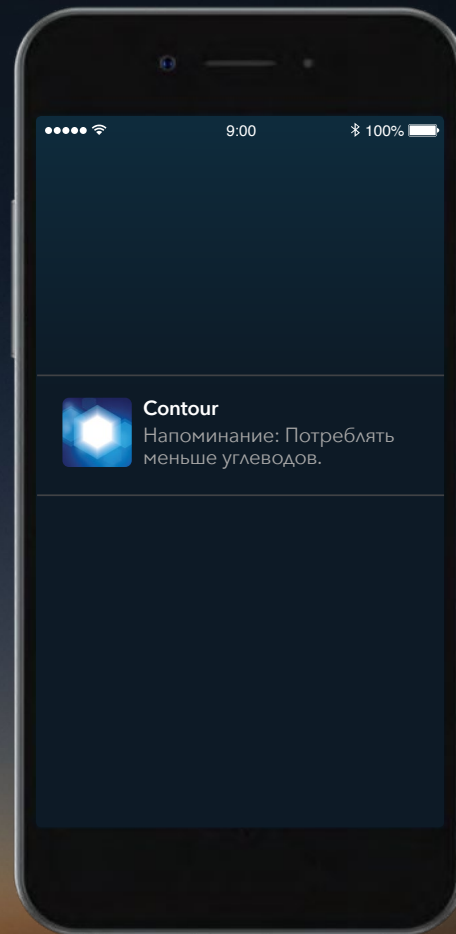

Contour[®]
plus ONE»
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

6. Тенденции


После выбора времени напоминание появится на экране.

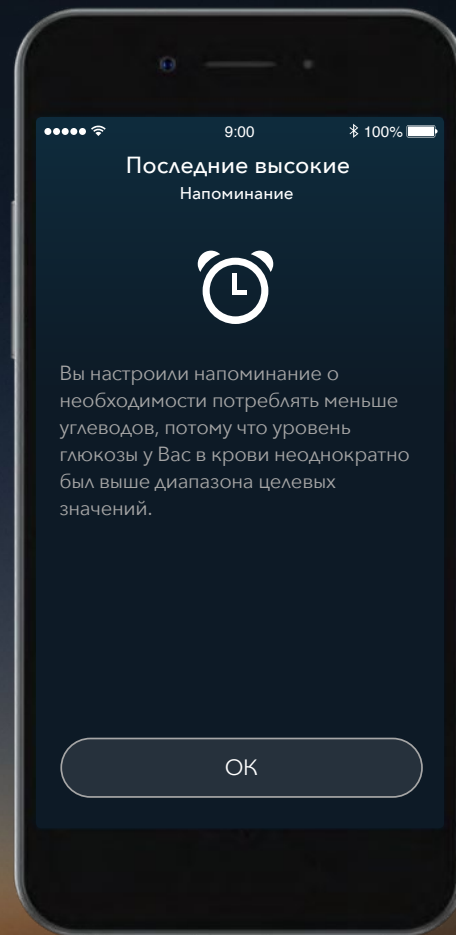

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

7. Тенденции

Через 3 дня вы получите контрольное сообщение о том, помогли ли внесенные изменения повлиять на тенденцию **«Последние высокие»**.

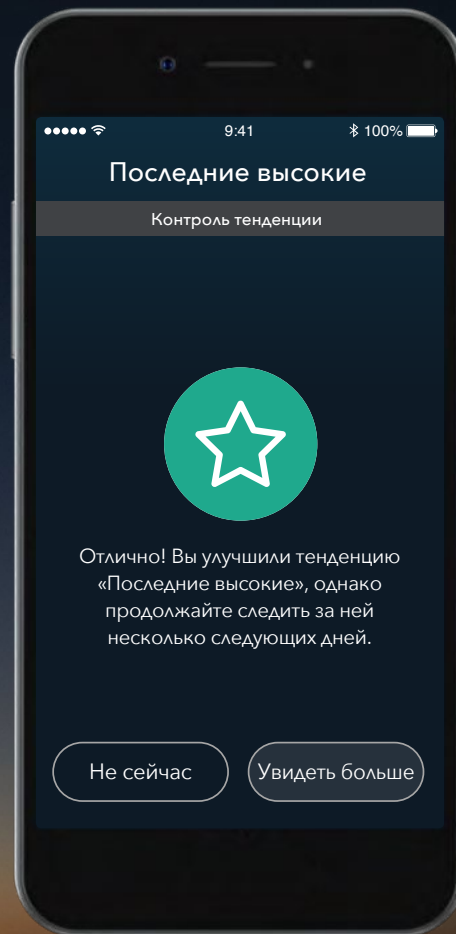


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

7. Тенденции

Через 3 дня вы получите контрольное сообщение о том, помогли ли внесенные изменения повлиять на тенденцию **«Последние высокие»**.


Чтобы узнать больше, коснитесь кнопки **«Увидеть больше»**.

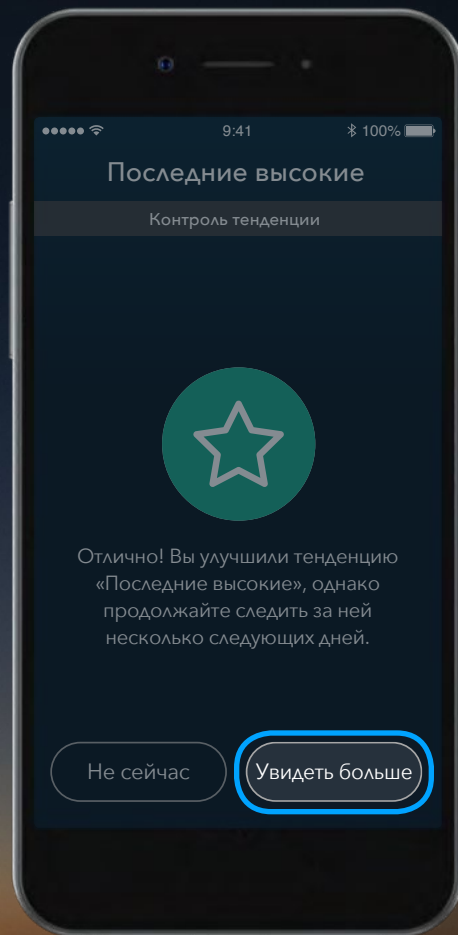

Contour
plus ONE
Контур® Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови


7. Тенденции

Данная тенденция переносится в историю, где ее в любое время можно просмотреть, выбрав в меню пункт «**Мои тенденции**».

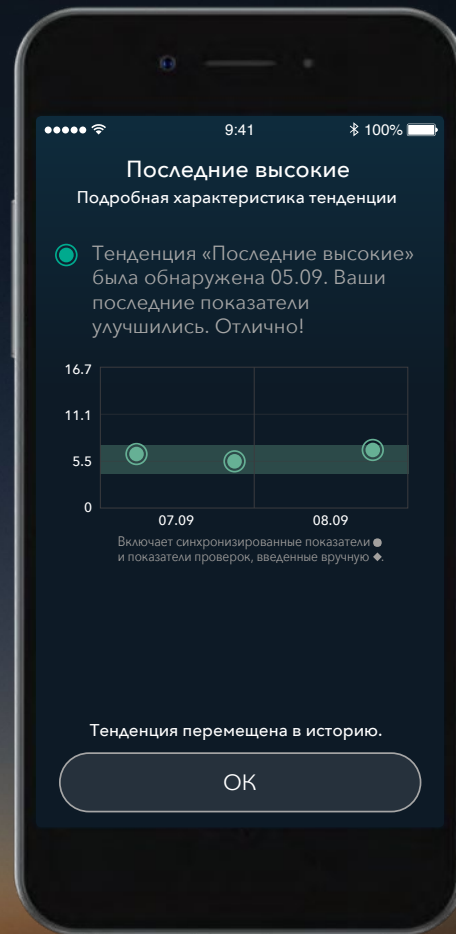

8. Тенденции


В любое время доступ к тенденциям возможен через пункт «**История тенденций**», где можно добавить дополнительные примечания о возможных причинах данной тенденции, что поможет вам при будущих визитах к вашему врачу.

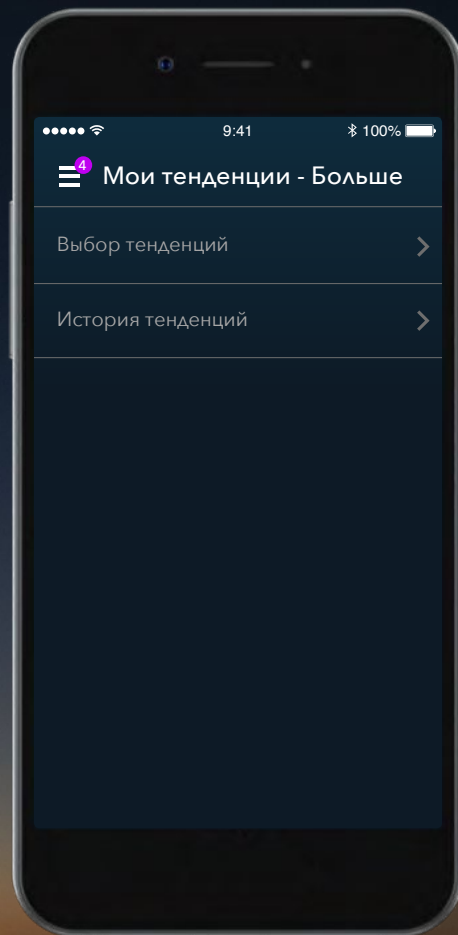

Contour[®]
plus ONE[»]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

8. Тенденции

В любое время доступ к тенденциям возможен через пункт **«История тенденций»**, где можно добавить дополнительные примечания о возможных причинах данной тенденции, что поможет вам при будущих визитах к вашему врачу.

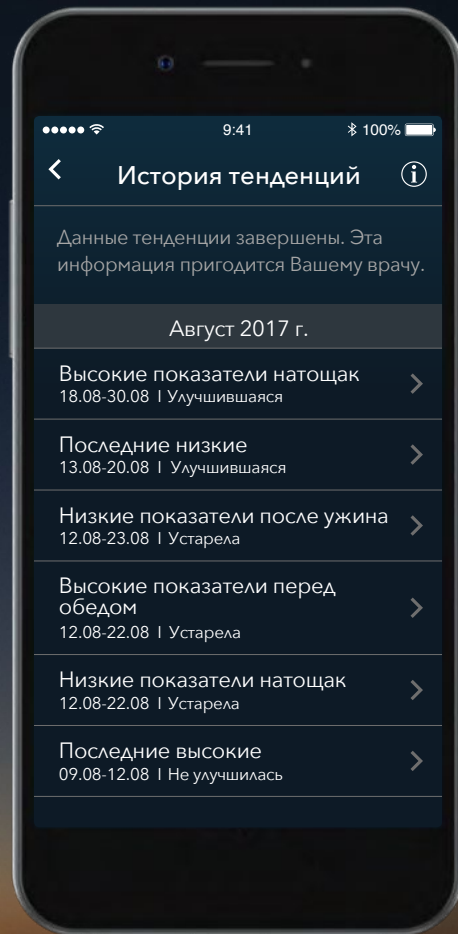

Contour[®]
plus ONE[™]
Контур[®]Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

При наличии вопросов об интеллектуальном глюкометре **CONTOUR®PLUS ONE** или Приложении **CONTOUR™DIABETES** обратитесь к своему врачу или к руководству пользователя глюкометра.

За дополнительной информацией зайдите на сайт:
www.diabetes.ascensia.com.ru




Гипотетические данные пациента представлены только в демонстрационных целях. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем внести изменения в лечение диету или физические упражнения.



Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков в настоящем документе осуществляется в соответствии с лицензией. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care и Contour (Контур), являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ).

Дата подготовки: Февраль 2018 г. Код: G.DC.10.2017.52579

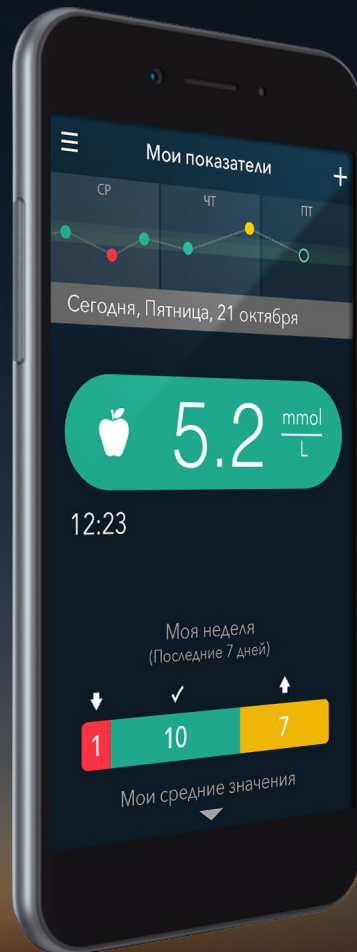

**Contour®
plus ONE**
Контур®Плюс Уан
Система для измерения уровня глюкозы в крови

Contour[®]
diabetes solutions